

АНДРОФЛОР®: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ответы разработчиков технологии на самые частые вопросы врачей

Специальное издание к XXVIII Конгрессу РОУ
г. Екатеринбург, 08-10 ноября 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Что такое Андрофлор®?	4
Кто разработал тест?	5
Секвенирование, ПЦР, посев: как сравнить эти технологии?	6
Каковы основные показания к назначению исследований Андрофлор®?	8
Какой биоматериал направлять на исследования?	9
Есть ли специальные «секреты» взятия биоматериала на Андрофлор® и его хранения?	10
Что выбрать: Андрофлор® или Андрофлор®Скрин?	11
Как прочитать бланк?	12
Почему не рекомендуется направлять биоматериал мужчин на Фемофлор®?	14
Андрофлор® и микробиологический посев: «несовпадение» или взаимное дополнение результатов?	18
Где выполнить Андрофлор®?	22

ЧТО ТАКОЕ АНДРОФЛОР®?

Андрофлор® – запатентованный компанией «ДНК-Технология» (Патент № 2008 105 063 от 13.02.2008 г.) и зарегистрированный в МЗ РФ в качестве медицинского диагностикума (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4490 от 25.07.2016 г.) способ количественного исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в реальном времени. В основе исследования – современные представления о сложном составе микробиома (набор микроорганизмов, живущих в организме человека).




Сейчас очевидно, что ранее распространенный подход поиска отдельных микробов – возбудителей заболеваний репродуктивного тракта – информативен только в отношении диагностики ИППП. В большинстве случаев источник неприятных симптомов и жалоб пациентов по поводу урогенитальных инфекций – не наличие патогенов (*Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*), а дисбиотический процесс (нарушение качественно-количественных соотношений компонентов нормальной и условно-патогенной микрофлоры). Для решения этой задачи может быть использован метод ПЦР в реальном времени, который позволяет одновременно оценить факт наличия/отсутствия в биоматериале основных ИППП и охарактеризовать вклад различных групп микроорганизмов в общую бактериальную массу. По сути, тест Андрофлор® отвечает на вопрос: «Кто в доме хозяин?» и с успехом заменяет традиционный ПЦР-анализ (ПЦР-комплексы). Инновационность технологического решения, позволившая сделать такую диагностику финансово доступной для рутинного использования в практике, состоит в групповой идентификации микроорганизмов и применении мультиплексного анализа.

В случае обследования на инфекции, Андрофлор® можно назначать одновременно с микробиологическим исследованием, получая за 1-2 дня результат по всем основным группам бактерий, включая некультивируемые при посеве анаэробы. Из исходного биоматериала по усмотрению врача также можно выполнить ПЦР-диагностику вирусов (HSV, CMV, EBV, HPV).

КТО РАЗРАБОТАЛ ТЕСТ?

Авторы нового подхода исследования микрофлоры (тесты Фемофлор[®], Андрофлор[®]) – группа врачей и ученых ведущих клинических центров России и компании «ДНК-Технология». Это полностью отечественное изобретение – этапы разработки, клинической валидации исследований, выпуска оборудования и наборов реагентов для выполнения анализа осуществляются в России в соответствии с международными стандартами (компания сертифицирована в системе менеджмента качества в области invitro-диагностики *ISO 13485:2016, ISO 9001:2015*).

Научные исследования по созданию Фемофлора[®] и Андрофлора[®] начались в 2005 году, в 2014 г. разработчики были признаны победителями национальной медицинской премии «Призвание» (номинация «За создание нового метода диагностики»), в 2016 г. – победителями международной премии Prix Galien Russia (номинация «Лучший российский продукт»), в 2017 г. – призерами Конкурса МЗ РФ на лучшую отечественную разработку медицинских изделий.

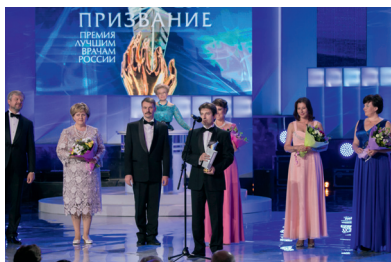

Основной вопрос, который нам задают врачи, обычно звучит так: «Какую лабораторию вы представляете?». Поэтому хотим особо подчеркнуть, что «ДНК-Технология» –



это производственный холдинг, выпускающий оборудование и наборы реагентов для ПЦР-диагностики. Наши партнеры – медицинские лаборатории в России (более 250 городов) и 45 странах мира, в сотрудничестве с которыми мы осуществляем маркетинговую поддержку и взаимодействие с врачами-клиницистами.

СЕКВЕНИРОВАНИЕ, ПЦР, ПОСЕВ: КАКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

В работах последних лет* продемонстрирована необходимость применения молекулярно-генетических исследований (обычно используется секвенирование нового поколения – next generation sequencing – NGS или метод ПЦР в реальном времени) наряду с микробиологическим посевом – стандартным методом верификации диагноза при инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта. Преимущества использования молекулярно-генетических технологий связаны с формированием бактериями биопленок, трансформацией микробов в L-формы и биологическими особенностями анаэробной микрофлоры.

Молекулярно-генетические методики исследования позволяют выявлять некультивируемые микробы

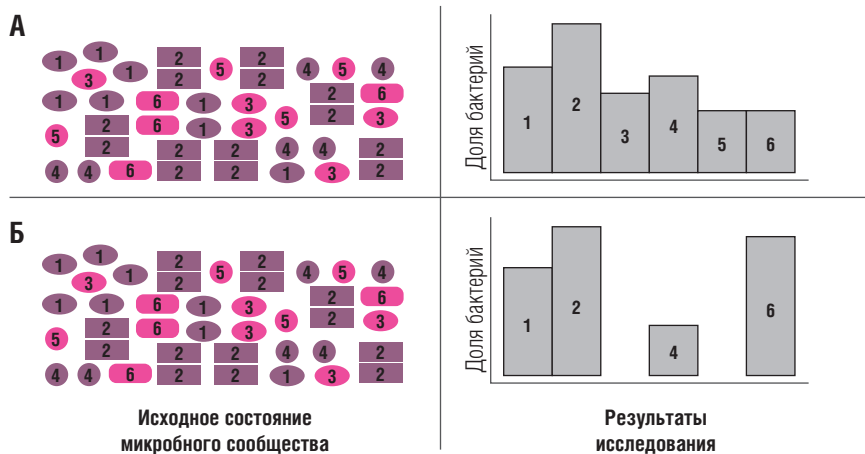


Рис. 1. Зависимость результатов исследования микрофлоры от используемой методики**.

А. Использование молекулярно-генетических методик дает возможность выявить и определить количества всех представителей микробиоты в исследуемом материале.

Б. При использовании культуральных методик были «потеряны» некультивируемые микробы 3 и 5. Микроб 6 размножился в транспортной среде, поэтому сложилось впечатление, что его было больше в микрофлоре, чем в действительности. Микроб 4, наоборот, хуже культивируется в подобранных условиях, поэтому его количества были занижены по сравнению с истинными.

За рубежом основная технология исследования микробиоты – NGS, что не может массово использоваться в практике из-за технологических сложностей, низкой распространенности и высокой стоимости (стоимость одного запуска составляет несколько тысяч евро). Для решения клинических задач целесообразно использовать технологию ПЦР в реальном времени (тесты Фемофлор[®], Андрофлор[®]), основанную на идентификации фрагментов генома микроорганизмов, что позволяет обеспечивать рекордно высокие аналитические характеристики – специфичность (около 100 %) и чувствительность (от единичных копий).



Чем хронический процесс вызывает интерес:
Видно ль стертое течение с бакпосевом или без?
Раз сомнения на пути – терапии не найти...
В диагностике процесса Андрофлор не обойти!

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Февраль

* фрагмент из подарочного издания календаря, подготовленного компанией «ДНК-Технология»

-
- Melissa A. Cregger et al. Reproductive Microbiomes: Using the Microbiome as a Novel Diagnostic Tool for Endometriosis / Reproductive Immunology: Open Access, 2017, Vol. 2 No. 3:36 2017.
 - Reet Mandar et al. Complementary seminovaginal microbiome in couples. / Research in Microbiology, 166 (2015), 440-447.
 - Xin Tao et al. Characterizing the endometrial microbiome by analyzing the ultra-low bacteria from embryo transfer catheter tips in IVF cycles: Next generation sequencing (NGS) analysis of the 16S ribosomal gene / Human Microbiome Journal, 3 (2017), 15-21.
 - Aline C. Freitas et al. The vaginal microbiome of pregnant women is less rich and diverse, with lower prevalence of Mollicutes, compared to non-pregnant women / Scientific Reports, 7:9212, DOI:10.1038/s41598-017-07790-9.
 - William T. Budd et al. Metagenomics Analysis Using Next Generation Sequencing of Vaginal Samples from Community Practices in the US / MOJ Cell Sci Rep , 2015, 2 (2): 00020.
 - Juan Antonio García-Velasco et al. What fertility specialists should know about the vaginal microbiome: a review / REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, 35 (2017), 103-112.

Ворошилина Е. С., Плотко Е. Э. и др. Микробиоценоз влагалища с точки зрения ПЦР в реальном времени. Возможности коррекции дисбиотических нарушений влагалища. – Екатеринбург, 2018.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ АНДРОФЛОР®?

Разработанные для клинической практики тесты Андрофлор® могут быть назначены:

- пациентам с наличием жалоб и/или симптомов воспаления нижних и верхних отделов мочеполовой системы,
- для диагностики инфекционного фактора при бесплодии, причин рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы половых партнеров, раннего выявления бессимптомных нарушений репродуктивной системы,
- для профилактического обследования, даже в отсутствии жалоб.

На урологическом приеме можно рекомендовать сдачу биоматериала на Андрофлор® пациентам с острым и хроническим уретритом, баланопоститом, простатитом, эпидидимитом, а также пациентам, обратившимся с проблемой неэффективного лечения, бесплодия, невынашиванием беременности у супруги, для прегравидарной подготовки, перед ЭКО.



В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря!
То – не военная акция, а диспансеризация!
Тут внимание деталям крайне важно уделить,
Стратегически решением Андрофлор пора внедрить!

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Айрель

* фрагмент из подарочного издания календаря, подготовленного компанией «ДНК-Технология»

КАКОЙ БИОМАТЕРИАЛ НАПРАВЛЯТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЯ?

На анализ можно направлять разные виды биоматериала – соскоб и отделяемое уретры, секрет простаты и/или эякулят. Важно помнить, что ПЦР – прямой метод диагностики инфекций, поэтому материал нужно брать из локализаций, наиболее приближенных к предполагаемому очагу воспаления.

- При хроническом уретрите, баланопостите необходимо брать соскоб из уретры – это наиболее информативный материал для диагностики данных заболеваний.
- Если врач заподозрил эпидидимит или простатит, можно рекомендовать взятие секрета предстательной железы или эякулята.
- С целью дифференциальной диагностики уретрита от простатита целесообразно взятие двух образцов – соскоба из уретры и секрета простаты (или эякулята).
- У пациентов с асимптоматическим течением инфекций, передающихся половым путём, или у пациентов, которых направил гинеколог в связи с обследованием женщины относительно невынашивания беременности, бесплодия или прегравидарной подготовки, можно выполнять анализ эякулята.

Важно подчеркнуть, что такой биоматериал, как моча, не всегда подходит для диагностики инфекций, передающихся половым путем, и оценки микрофлоры методом ПЦР в реальном времени. Причина в следующем: в отсутствие острого воспаления в моче может содержаться недостаточное количество клеток, которые являются одним из маркеров адекватности биоматериала, поэтому результат исследования может быть недостоверным.



* фрагмент из подарочного издания календаря,
подготовленного компанией «ДНК-Технология»

ЕСТЬ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ «СЕКРЕТЫ» ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА НА АНДРОФЛОР® И ЕГО ХРАНЕНИЯ?

Если коротко, то нет! Никаких специальных требований или указаний по взятию материала для исследований Андрофлор® не существует. В то же время стандартные рекомендации по преаналитике актуальны и крайне важны: как и любой другой метод диагностики инфекций (микроскопия, микробиология и т.д.), ПЦР в реальном времени требует соблюдения правил подготовки пациентов, условий взятия и хранения материала – половой покой или барьерная контрацепция в течение минимум 3-х дней (для минимизации риска контаминации материала микрофлорой полового партнера), исключение использования антибиотиков или антисептиков (в том числе, например, антибактериальное мыло), воздержание от мочеиспускания в течение 3-х часов перед взятием соскоба, рекомендация помочиться и провести туалет половых органов перед взятием секрета простаты или эякулята и т.п.

Единственный нюанс, на который хочется обратить внимание врачей, состоит в следующем: наиболее удобный биоматериал для пациента – эякулят, и его можно собирать дома путем ручной мастурбации. Не допускается направление на анализ эякулята, полученного путем прерванного полового акта (биоматериал будет содержать значительную примесь транзитной микрофлоры), или эякулята из презерватива (компоненты смазки ингибируют ПЦР). Взятый материал необходимо хранить в холодильнике (не более суток) или заморозить. Соблюдение жестких условий хранения биоматериала (срочная транспортировка в лабораторию, хранение при определенной температуре) не требуется, поскольку исследование проводится некультивационной методикой.



Верно: зачем помет хворь любую подомет!
Но куда девать прогресс? Или бежать обратно в лес:
Приложить к большому месту с подорожником конюресс?!
Предлагаем Андрофлор, чтоб забыть дорогу в бор,
Сократить мужскую силу и болезням дать отпор!

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Январь

* фрагмент из подарочного издания календаря,
подготовленного компанией «ДНК-Технология»


ЧТО ВЫБРАТЬ: АНДРОФЛОР® ИЛИ АНДРОФЛОР®СКРИН?

В состав каждого исследования входит обнаружение основных патогенов (*Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*) и количественная оценка представителей нормальной и условно-патогенной микрофлоры (бактерии, дрожжевые грибы рода *Candida*). Основная разница между этими тестами – в наборе определяемых возбудителей и, следовательно, показаниях к назначению. Андрофлор®Скрин – более короткий профиль, его рекомендуется назначать для диагностики острых форм заболеваний или при профилактических обследованиях.



Андрофлор® – это расширенное исследование, спектр бактерий существенно дополнен, в основном, облигатно-анаэробными микроорганизмами, его целесообразно использовать в более сложных клинических случаях: при хронических формах заболеваний, для определения возможного влияния инфекций на бесплодие, при подготовке к ЭКО, для обследования пациентов с жалобами на неэффективное лечение.

КАК ПРОЧИТАТЬ БЛАНК?

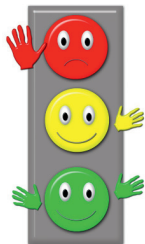


Прочесть бланк анализа можно очень быстро, поскольку использована интуитивно понятная каждому из нас цветовая кодировка — показатели, соответствующие критериям нормы, маркируются зеленым. Показатели с отклонением от критериев нормы — желтыми (умеренное отклонение) и красными (выраженное отклонение) маркерами. Кроме того, внизу на бланке приводится лабораторное заключение.

Для удобства показатели тестов Андрофлор®Скрин и Андрофлор® можно объединить в группы. Вначале обращаем внимание на верхние строчки — это показатели, которые оценивают адекватность представленного на исследование материала — геномная ДНК человека (показывает количество клеток, их должно быть достаточно для прохождения анализа), общая бактериальная масса (общая обсемененность биотопа) и количество транзитной микрофлоры (определяется количество лактобактерий). Тот материал, который удовлетворяет всем критериям, признается адекватным, а результат исследования действительно описывает состояние микрофлоры. При несоответствии критериям нормы рекомендуется повторное взятие биоматериала с соблюдением правил подготовки пациента и взятия образца (указывается в заключении на бланке анализа).

Далее нужно смотреть на колонку относительных результатов, там приведены количества (доли) микроорганизмов по отношению к общей бактериальной массе. Именно эти величины оцениваются при формировании заключения о состоянии микрофлоры. Дрожжевые грибы *Candida* трактуем по абсолютному значению, для патогенов клинически интерпретируем факт обнаружения. Как альтернатива табличной форме, результаты представлены в виде графика. Здесь клинически значимые количества микроорганизмов также выделены цветом.

Наш опыт использования Андрофлора® демонстрирует, что у большинства пациентов соотношение микроорганизмов, описывающих состояние микрофлоры, является уникальным, особенно у пациентов с асимптоматическим воспалительным процессом.

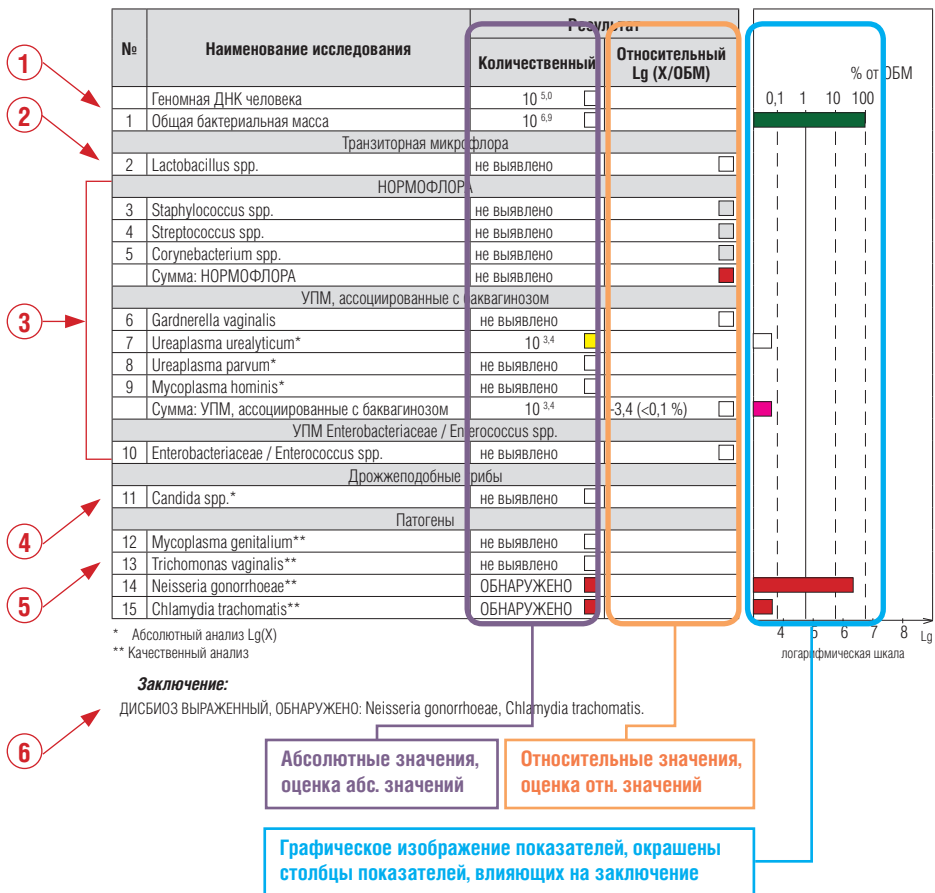

- ① Оценка биоматериала («биоопленки»)
 - Количество клеток
 - Количество бактерий
- ② Оценка транзиторной микрофлоры
 - Маркер примеси женской микрофлоры при хронических формах
- ③ Оценка структуры микрофлоры
 - Количество нормальной микрофлоры
 - Количество условно-патогенных микробов
- ④ Оценка грибов Candida
- ⑤ Оценка патогенов
- ⑥ Лабораторное заключение


Рис. 2. Образец выдачи результата исследования Андроплор®Скрин.

ПОЧЕМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ БИОМАТЕРИАЛ МУЖЧИН НА ФЕМОФЛОР®?

Парадоксально, но факт: некоторые врачи, направлявшие до появления Андрофлора® биоматериал мужчин на исследование Фемофлор®, продолжают так работать. В связи с этим, хотелось бы объяснить принципиальную разницу «мужского» и «женского» тестов: исследования отличаются не только набором определяемых показателей, но и подходом к интерпретации результатов и формированию лабораторного заключения. Приведем результаты эксперимента, когда один и тот же биоматериал (эякулят), был параллельно поставлен на оба исследования (рис. 3, 4).

A

№	Наименование исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/СВМО)
1	Геномная ДНК человека	10 ^{5.8}	<input type="checkbox"/>
	Общая бактериальная масса	10 ^{5.2}	<input type="checkbox"/>
Транзиторная микрофлора			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{4.8}	-0,8 (12-17 %) <input checked="" type="checkbox"/>
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	10 ^{3.3}	-2,3 (0,4-0,6 %) <input type="checkbox"/>
4	Streptococcus spp.	10 ^{3.1}	-2,6 (0,2-0,3 %) <input type="checkbox"/>
5	Corynebacterium spp.	10 ^{4.1}	-1,5 (2,4-3,3 %) <input type="checkbox"/>
	Сумма: НОРМОФЛОРА	10 ^{4.2}	-1,4 (3-4 %) <input checked="" type="checkbox"/>
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	10 ^{5.1}	-0,5 (27-36 %) <input type="checkbox"/>
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	10 ^{3.1}	-2,5 (0,3-0,4 %) <input type="checkbox"/>
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	10 ^{4.1}	-1,5 (3-4 %) <input type="checkbox"/>
9	Ureaplasma urealyticum*	10 ^{4.3}	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Ureaplasma parvum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
11	Mycoplasma hominis*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
12	Atopobium cluster	10 ^{4.7}	-0,9 (10-14 %) <input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	10 ^{5.3}	-0,3 (44-60%) <input checked="" type="checkbox"/>
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	10 ^{4.6}	-1,0 (8-10 %) <input type="checkbox"/>
14	Anaerococcus spp.	10 ^{4.6}	-1,0 (8-11 %) <input type="checkbox"/>
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	10 ^{3.9}	-1,7 (1,8-2,4 %) <input type="checkbox"/>
16	Eubacterium spp.	10 ^{4.6}	-1,1 (7-10 %) <input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ анаэробы	10 ^{5.1}	-0,5 (25-34 %) <input type="checkbox"/>
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Дрожжеподобные грибы			
20	Candida spp.*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Патогены			
21	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
22	Trichomonas vaginalis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
23	Neisseria gonorrhoeae**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
24	Chlamydia trachomatis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>

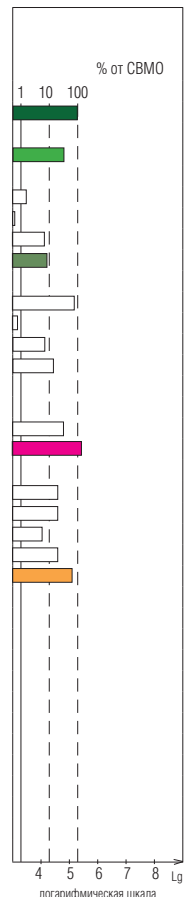


* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

Заключение: Превышение пороговых значений транзитной микрофлоры. Рекомендуется повторное взятие биологического материала не менее, чем через три дня (с соблюдением правил подготовки к взятию биоматериала). ВНИМАНИЕ! Транзиторная микрофлора может быть причиной острых воспалительных процессов нижних отделов уrogenитального тракта.

Б

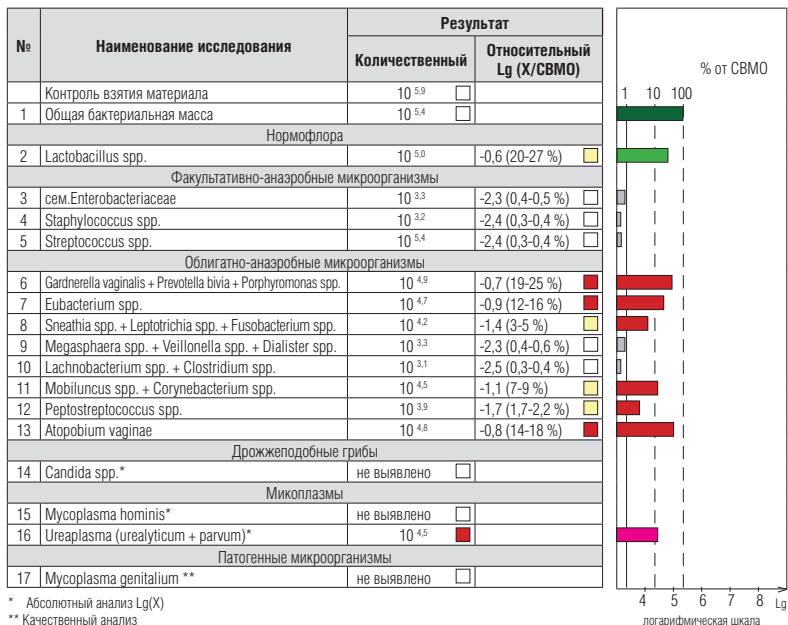

* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ


Заключение: Умеренный Анаэробный дисбиоз

Рис. 3. Параллельные постановки биоматериала на исследование Андрофлор® (А) и Фемофлор® (Б).

Применение теста Фемофлор® не позволяет выявить ряд клинически значимых микроорганизмов (группа УПМ анаэробы), автоматическая трактовка бланка по алгоритму Фемофлор® приводит к получению некорректной формулировки заключения «Умеренный анаэробный дисбиоз».

A

№	Наименование исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/СВМО)
	Геномная ДНК человека	10 ^{4,9}	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	10 ^{3,4}	<input type="checkbox"/>
Транзиторная микрофлора			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
4	Streptococcus spp.	10 ^{3,4}	<input type="checkbox"/>
5	Corynebacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: НОРМОФЛОРА	10 ^{3,4}	<input type="checkbox"/>
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
9	Ureaplasma urealyticum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
10	Ureaplasma parvum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
11	Mycoplasma hominis*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
12	Atopobium cluster	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
14	Anaerococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
16	Eubacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ анаэробы	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Дрожжеподобные грибы			
20	Candida spp.*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Патогены			
21	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
22	Trichomonas vaginalis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
23	Neisseria gonorrhoeae**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
24	Chlamydia trachomatis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>

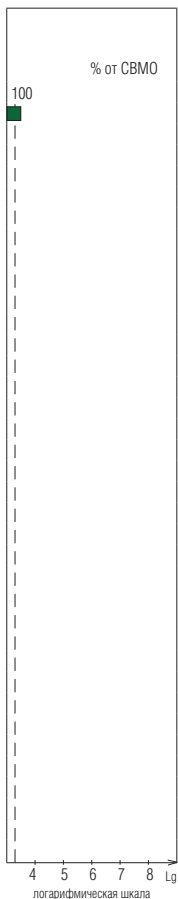

* Абсолютный анализ Lg(X)
 ** Качественный анализ

Заключение: НОРМОЦЕНОЗ.

Б

№	Наименование исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/СВМО)
	Контроль взятия материала	10 ^{5.3}	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	10 ^{3.7}	<input checked="" type="checkbox"/>
Нормофлора			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Факультативно-анаэробные микроорганизмы			
3	сем. Enterobacteriaceae	не выявлено	<input type="checkbox"/>
4	Staphylococcus spp.	10 ^{3.7}	0,0 (85-100 %) <input checked="" type="checkbox"/>
5	Streptococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Облигатно-анаэробные микроорганизмы			
6	Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Eubacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
8	Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
9	Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
10	Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
11	Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
12	Peptostreptococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
13	Atopobium vaginae	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Дрожжеподобные грибы			
14	Candida spp.*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Микоплазмы			
15	Mycoplasma hominis*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
16	Ureaplasma (urealyticum + parvum)*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Патогенные микроорганизмы			
17	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	<input type="checkbox"/>

* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

Заключение: Значение контрольного показателя «Общая бактериальная масса» ниже пороговой величины. Лабораторное заключение не может быть сформировано автоматически. По решению врача возможно повторное взятие биоматериала и выполнение исследования.

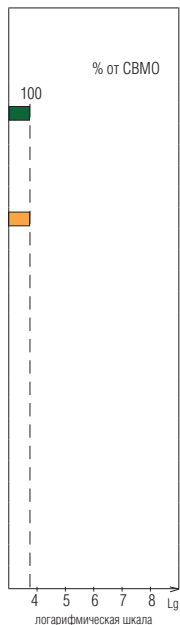



Рис. 4. Параллельные постановки биоматериала на исследование Андрофлор® (А) и Фемофлор® (Б).

Применение теста Фемофлор® затрудняет трактовку результата исследования, автоматическая трактовка бланка по алгоритму Фемофлор® приводит к получению некорректной формулировки заключения о состоянии микрофлоры для пациента с нормоценозом.

АНДРОФЛОР® И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ: «НЕСОВПАДЕНИЕ» ИЛИ ВЗАИМНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ?

Один из самых популярных вопросов касается сравнения результатов исследований ПЦР в реальном времени (тест Андрофлор®) и посева: почему часто видим несоответствие заключений, чем это объясняется? Попробуем прояснить ситуацию с использованием клинических примеров (рис. 5), предоставленных лабораторией медицинского центра «Гармония» (г. Екатеринбург).


Микробиологический посев: *Enterococcus faecalis* 10^{5.1}.
 В посеве выявлены хорошо культивируемые микроорганизмы, результат ПЦР в реальном времени – аналогичен. Дополнительно, Андрофлор® позволил определить повышенные количества анаэробных микроорганизмов (в данном случае не играют доминирующей роли в дисбиозе).

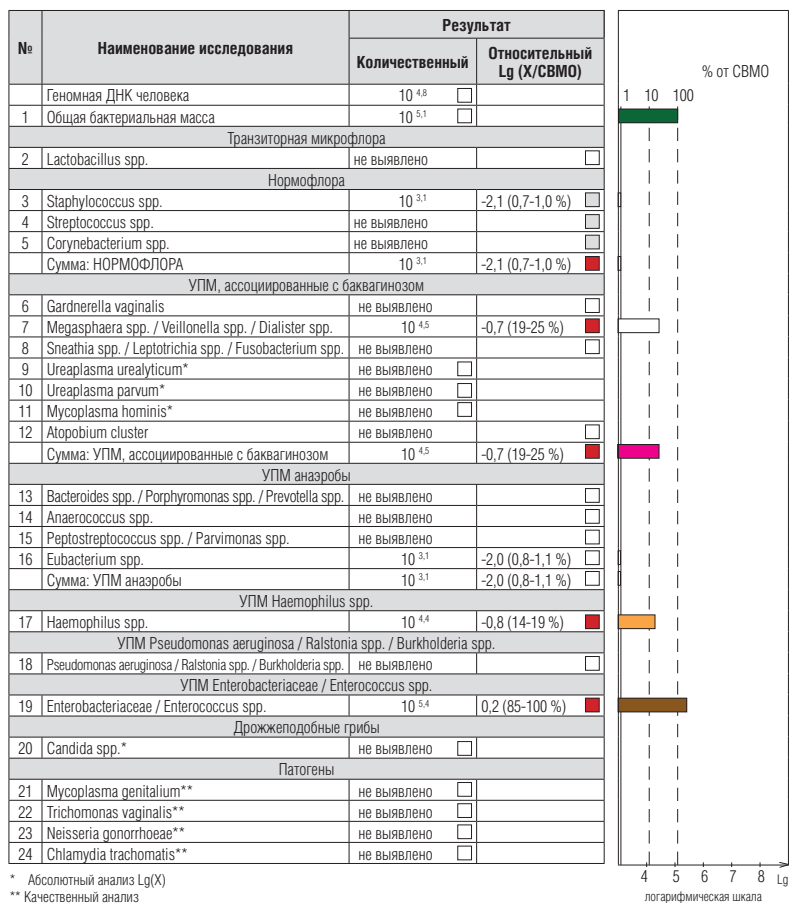

* Абсолютный анализ Lg(X)
 ** Качественный анализ

Заключение: ДИСБИОЗ ВЫРАЖЕННЫЙ с преобладанием Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.

№	Наименование исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/ОБМ)
	Геномная ДНК человека	10 ^{4.8}	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	10 ^{6.4}	<input type="checkbox"/>
Lactobacillus spp.			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
4	Streptococcus spp.	10 ^{3.1}	-3,3 (<0,1%)
5	Corynebacterium spp.	10 ^{4.1}	-2,3 (0,4-0,6%)
	Сумма: НОРМОФЛОРА	10 ^{4.1}	-2,3 (0,5-0,6%)
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	10 ^{5.3}	-1,1 (7-9%)
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	10 ^{3.1}	-3,3 (<0,1%)
9	Ureaplasma urealyticum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
10	Ureaplasma parvum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
11	Mycoplasma hominis*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
12	Atopobium cluster	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	10 ^{5.3}	-1,1 (7-9%)
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	10 ^{6.2}	-0,2 (52-70%)
14	Anaerococcus spp.	10 ^{4.9}	-1,5 (3-4%)
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	10 ^{4.9}	-1,5 (3-4%)
16	Eubacterium spp.	10 ^{5.3}	-1,1 (7-9%)
	Сумма: УПМ анаэробы	10 ^{6.2}	-0,1 (64-87%)
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.	10 ^{4.5}	-1,9 (1,1-1,4%)
Дрожжеподобные грибы			
20	Candida spp.*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Патогены			
21	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
22	Trichomonas vaginalis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
23	Neisseria gonorrhoeae**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
24	Chlamydia trachomatis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>

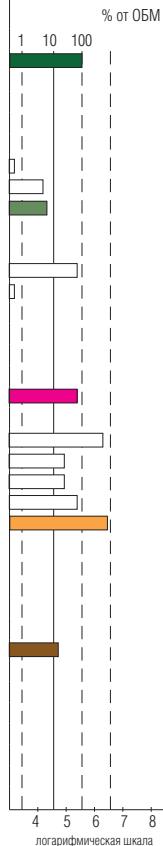

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

Заключение: ДИСБИОЗ ВЫРАЖЕННЫЙ с преобладанием условно-патогенных анаэробных микроорганизмов

Микробиологический посев: Enterococcus faecalis 10*3.

В посеве выявлены хорошо культивируемые микроорганизмы, результат ПЦР в реальном времени – аналогичен. Однако, в структуре дисбиоза доминирующая роль принадлежит не Enterococcus, а условно-патогенным анаэробным микроорганизмам (в посеве не определены).

№	Наименование исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/ОБМ)
	Геномная ДНК человека	10 ^{4,9}	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Транзиторная микрофлора			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
4	Streptococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
5	Corynebacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: НОРМОФЛОРА	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
9	Ureaplasma urealyticum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
10	Ureaplasma parvum*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
11	Mycoplasma hominis*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
12	Atopobium cluster	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
14	Anaerococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
16	Eubacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ анаэробы	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Дрожжеподобные грибы			
20	Candida spp.*	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Патогены			
21	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
22	Trichomonas vaginalis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
23	Neisseria gonorrhoeae**	не выявлено	<input type="checkbox"/>
24	Chlamydia trachomatis**	не выявлено	<input type="checkbox"/>

% от ОБМ

4 5 6 7 8 Lg
логарифмическая шкала

* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

Заключение: НОРМОЦЕНОЗ.

Микробиологический посев: нет роста
Совпадение результатов двух методик.

Рис. 5. Результаты параллельного исследования биоматериала пациентов методом ПЦП в реальном времени (тест Андрофлор®) и микробиологического посева.

Таким образом, метод ПЦР в реальном времени (тест Андрофлор®) может рассматриваться как дополнение к стандартной методике культивирования микроорганизмов, дополняя и уточняя ее результаты.

Несовпадение заключений объясняется технологическими особенностями методов: в случае молекулярно-генетических тестов в бланке анализа будет представлена «калька» микрофлоры (соотношение микроорганизмов в результате анализа аналогично структуре микрофлоры в момент взятия биоматериала). На результат посева существенное влияние оказывают условия взятия, транспортировки и культивирования бактерий, поскольку для облигатно-анаэробных микроорганизмов кислород воздуха является губительным, что приводит к потере жизнеспособности микробов, а, следовательно, недостоверному заключению. Формулировка результата микробиологического анализа «рост микроорганизмов отсутствует» может свидетельствовать о широком диапазоне состояния микрофлоры – от нормоценоза до выраженного анаэробного дисбиоза.



В часуе, как жар горь, тридцать три богатыря!
 Ты – не зеленая ягода, а дисбактериозная!
 Тут внимание деталей крайне важно уделить,
 Стратегическое решение Андрофлор пора внедрить!

	Вт	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							

Айрель

* фрагмент из подарочного издания календаря, подготовленного компанией «ДНК-Технология»

ГДЕ ВЫПОЛНИТЬ АНДРОФЛОР®?

Список партнерских лабораторий постоянно расширяется, ниже приводим перечень, актуальный на ноябрь 2018 г.

Сетевые клинико-диагностические лаборатории		
Клинико-диагностические лаборатории KDL	www.kdllab.ru	8 (800) 700-60-40
Клинико-диагностические лаборатории СИТИЛАБ	www.citilab.ru	8 (800) 100-363-0
Лабораторная служба Хеликс	www.helix.ru	8 (800) 700-03-03
Медицинская компания ИНВИТРО	www.invitro.ru	8 (800) 200-363-0
Независимая лаборатория «Юнилаб»	www.unilab.ru	8 (800) 555-55-69
ООО «Лаборатория Гемотест»	www.gemotest.ru	8 (800) 550-13-13
Дальневосточный Федеральный Округ		
Виктори Клиник (ООО «ИКС-РЕЙ»), г. Якутск	www.victory-clinic.ru	+7 (4112) 42-10-00 +7 (4112) 42-50-00
ГБУЗ «Перинатальный центр», г. Хабаровск	www.dvhab.ru	+7 (421) 245 19 33
ГБУЗ Городская поликлиника № 3, г. Хабаровск	www.gkp3.ru	+7 (4212) 46-12-07 +7 (4212) 46-12-19
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень	www.perinatal-center.pro	+7 (3452) 50-82-77 +7 (3452) 50-82-73
КВД, г. Чита	www.prodoctorov.ru	+7 (3022) 21-79-28
Лаборатория ДИБ, г. Петропавловк-Камчатский	www.med.kamchatka.ru	+7 (4152) 23-26-62
ЛДЦ «Абсолют», г. Хабаровск	www.абсолют-жизнь.ру	8 (800) 555-01-13
ЛДЦ «Спектр», г. Благовещенск	www.labspektr.ru	+7 (4162) 53-10-36
Медицинская клиника «Даймонд Клиник», г. Якутск	www.diamond-clinic.ru	+7 (4112) 26-21-11 +7 (4112) 74-47-07
Медицинский центр «Авиценна», г. Владивосток	www.avicenmed.com	+7 (423) 250-03-99
Медицинский Центр «Абсолют», г. Благовещенск	www.med-absolut.ru	+7 (4162) 52-00-10
Медицинский центр «Асклепий», г. Владивосток	www.asklepiy-dv.ru	+7 (423) 202-30-03
Медицинский центр «Медитекс», г. Петропавловск-Камчатский	www.mediteks.ru	+7 (4152) 26-05-01
Медицинский центр «ТАФИ », г. Владивосток	www.tafimed.ru	+7 (423) 242-56-60

Медицинский центр «Юнилаб», г. Владивосток	www.unilab.su	+7 (423) 224-21-24
Медицинский центр «Юнилаб», г. Хабаровск	www.unilab.su	+7 (4212) 37-71-41
НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск	www.iomid.ru	+7 (4212) 70-05-91
ООО «Меддиагностика», г. Южно-Сахалинск	www.meddiagnost.ru	+7 (4242) 77-01-22

Москва и Московская область

АО «Семейный доктор»	www.fdoctor.ru	+7 (499) 583-17-28
ЗАО «МЦК» Медцентр в Коломенском	www.mckolomen.ru	+7 (499) 612-03-88
КДЛ ООО «Клиника ЛМС»	www.klinikabudzdorov.ru	+7 (495) 663-03-03 +7 (495) 782-88-82
Клиника № 1, г. Обнинск	www.klinika1obninsk.ru	+7 (48439) 5-22-80 +7 (48439) 6-50-80
Лаборатория «ДиаЛаб»	www.dialab.ru	+7 (499) 242-83-65 +7 (499) 242-83-68
Лаборатория «НИАРМЕДИК ПЛЮС»	www.nrlab.ru	+7 (495) 617-03-55
Многопрофильный медицинский холдинг СМ-Клиника	www.smclinic.ru	+7 (495) 241-89-55
ООО «Бион»	www.bionlab.ru	+7 (495) 258-94-00
ООО «Лечебный центр», г. Москва	www.lcenter.ru	+7 (495) 786-45-20
ООО «МЕД-ЮТАС»	www.herpesclinic.ru	+7 (499) 126-60-09 +7 (495) 734-23-49
ООО «Мобил Медикал Лаб»	www.mobil-lab.ru	+7 (495) 781-000-3
ООО «Центр диагностики, профилактики и лечения ЭндоМедЛаб»	www.medcentr-endomedlab.ru	+7 (495) 627-61-03
ООО ДНКМ НЦ Молекулярно-генетических исследований	www.dnk-diagnostika.ru	+7 (495) 135-23-06
ФГБУ «НМИ Центр профилактической медицины»	www.gnicpm.ru	+7 (495) 790-71-72
ФНКЦ ФМБА России	www.fnkc-fmba.ru	+7 (499) 490-82-20
Юнимед Лабораториз	www.unimedlab.ru	+7 (495) 785-10-25 +7 (495) 931-99-76

Поволжский Федеральный Округ

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»	www.semashko.nnov.ru	+7 (831) 438-95-90
--	----------------------	--------------------

ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ», г. Йошкар-Ола	www.mari-el.gov.ru/ minzdrav/rcpbsiz/	+7 (8362) 45-77-27 +7 (8362) 63-05-80
ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр», г. Нижний Новгород	www.dcnr.ru	+7 (831) 421-09-79 +7 (831) 421-09-80
ГУЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»	www.sarcpsir.ru	+7 (8452) 50-91-51
Диагностическая лаборатория Гемохелп, г. Нижний Новгород	www.gemohelp.ru	8 (800) 100-08-05
Клиника «Мать и Дитя», г. Самара	www.samara.mamadeti.ru	+7 (846) 342-62-62 8 (800) 250-24-24
Лаборатория «НИКА СПРИНГ», г. Нижний Новгород	www.lab.nikann.ru	+7 (831) 26-00-226
ЛДЦ «БИОМЕД», г. Казань	www.biomed-mc.ru	+7 (843) 5-333-333
МЦ «Гармония», г. Нижнекамск	www.garmoniya-nk.ru	+7 (8555) 32-32-42
ООО «А-МЦ "УльтраМед"», г. Нижний Новгород	www.ultramed-nn.ru	+7 (831) 262-12-12
ООО «Женский центр», г. Нижний Новгород	www.wcentre.r52.ru	+7 (831) 260-10-03
ООО «Клиника Доктор Плюс», г. Ижевск	www.doktorplus.net	+7 (3412) 60-11-11
ООО «Клиника семейного врача +», г. Нижний Новгород	www.klsv.ru	+7 (831) 212-77-77
ООО «Лаборатория ТОНУС», г. Нижний Новгород	www.tonus.nnov.ru	+7 (831) 411-11-22
ООО «МедЛаб Экспресс», г. Ижевск	www.analiz18.ru	+7 (3412) 42-00-01 +7 (3412) 42-00-02
ООО «МЦ "Айболит"», г. Казань	www.mc-aybolit.ru	+7 (843) 255-41-41
ООО «МЦ Академия», г. Ульяновск	www.academy-med.ru	+7 (8422) 61-26-26
ООО «УниЛаб», г. Киров	www.moldiag.ru/company	+7 (8332) 57-82-03
ООО «Центр «Лайт», г. Киров	www.center-light.ru/analiz	+7 (8332) 711-100
Сеть клиник «САДКО», г. Нижний Новгород	www.sadkomed.ru	+7 (831) 4120-777
Северо-Западный Федеральный Округ, г. Санкт-Петербург		
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1», г. Вологда	mbl@vgp1.ru	+7 (8172) 21-01-40
ГлобусМед Лаборатория	www.globusmed-lab.ru	+7 (812) 244-59-59
Диагностический Лабораторный Центр Биотехмед	www.vitamed-spb.ru	+7 (812) 746-54-77


Иммунобиосервис	www.immunobios.ru	+7 (812) 417-00-00 +7 (812) 273-03-03
Лабстори Медицинская Компания	www.labstori.ru	+7 (812) 777-90-40
Многопрофильный медицинский холдинг СМ-Клиника	www.smclinic-spb.ru	+7 (812) 43-55555
МЦ профессора Савичевой «Микробиомед»	www.microbiomed.ru	+7 (812) 618-08-51 +7 (812) 325-32-20
НИЛ-диагностика «Explana»	www.explana.ru	+7 (812) 385-00-55
Областной Клинический Онкологический Диспансер, г. Великий Новгород	www.novonko.ru	+7 (8162) 62-70-62
Петроклиника Кудрово, Петроклиника на Фурштатской	petroclinic.ru	+7 (812) 490-76-00
ПСПбГМУ имени И. П. Павлова Центр лабораторной диагностики	www.1spbgmu.ru	+7 (812) 33866-11
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера	www.pasteurorg.ru	+7 (812) 23284-76
СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 11»	www.kvd11.ru	+7 (812) 27354-61
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»	www.ott.ru	+7 (812) 328-98-43 +7 (812) 323-75-44
Северо-Кавказский Федеральный Округ		
ООО «БиоТест», г. Пятигорск	www.biotest-kmv.ru	+7 (8793) 33-63-50
ООО «РЕКОН», г. Астрахань	www.rekon-lab.ru	+7 (8512) 52-33-73
ООО «Лаборатория № 1», г. Пятигорск	www.laboratory1.ru	+7 (8793) 39-78-02 +7 (8793) 39-78-03
СКККДЦ, г. Ставрополь	www.skcdc.ru	+7 (8652) 95-19-51 +7 (8652) 31-51-51
Сибирский Федеральный Округ		
Диагностический центр, г. Иркутск	www.dc.baikal.ru	+7 (3952) 211-240
КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр», г. Бийск	www.kdc.biysk.secna.ru	+7 (3854) 35-61-97
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»	www.gb4.sibmedport.ru	+7 (391) 218-18-92 +7 (391) 218-18-93
Медицинский центр «Диамед», г. Улан-Удэ	www.diamedrb.ru	+7 (3012) 55-21-41

Медицинский центр «Здоровье», г. Томск	www.mo-zdorovie.tomsk.ru	+7 (3822) 90-22-02
ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России	www.novoclinic54.ru	+7 (383) 203-71-75
Уральский Федеральный Округ		
ДНК клиника, г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Костанай	www.dnk174.ru	+7 (351) 211-03-03
КДЛ «Лорак», г. Уфа	www.lorak-ufa.ru	+7 (347) 250-55-15 +7 (347) 244-55-50
КДЛ МедиаЛаб, г. Уфа	www.medialabufa.ru	+7 (927) 236-68-77
Лаборатория «КвалитиМед», г. Екатеринбург	www.qualitymed.ru	+7 (343) 286-01-24
ЛДЦ «Авиценна Инк», г. Сургут	www.avicenna-ink.com	+7 (3462) 24-10-00
ЛДЦ «Центр ДНК», г. Курган	www.dnkcenr.ru/	+7 (352) 222-22-33
МБУ Екатеринбургский КДЦ, г. Екатеринбург	www.ekdc.org	+7 (343) 372-76-86
Медицинская лаборатория «Медис», г. Уфа	www.labmedis.ru	+7 (347) 292-75-47
МЦ «Гиппократ», г. Сургут	www.гиппократ86.рф	+7 (3462) 32-22-80 +7 (9048) 78-02-69
МЦ Гармония, г. Екатеринбург	www.g-mc.ru	+7 (343) 254-66-66 +7 (343) 235-15-55
Окружная клиническая больница, г. Ханты-Мансийск	www.okbhmao.ru/	+7 (3467) 39-00-02
ООО «Оздоровительный центр Вира», г. Сургут, г. Нефтеюганск	www.vira-center.ru	+7 (3463) 23-88-03
ООО «Центр диагностики и лечения», г. Челябинск	www.dnk174.ru	+7 (351) 211-00-03
Перинатальный центр, г. Курган	www.perinatal45.ru	+7 (352) 243-73-28
Перинатальный центр, г. Тюмень	www.perinatal-center.pro	+7 (345) 245-40-49
Преображенская клиника, г. Екатеринбург	www.preobrazhenskaya-klinika.ru	+7 (343) 317-12-96
Семейная клиника «Жемчужина», г. Челябинск	www.papamama.ru	+7 (351) 200-34-04
Сургутский клинический перинатальный центр	www.surgut-kpc.ru	+7 (3462) 52-97-35
Центр молекулярно-генетических экспертиз, г. Курган	www.cm-ge.com	+7 (963) 863-63-65
Центральный Федеральный Округ		
ВОККДЦ, г. Воронеж	mail@vokkdc.zdrav36.ru	+7 (473) 20-20-205

ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр», г. Рязань	kdc@yandex.ru	
ГУЗ Тульской области «Тульская областная клиническая больница»	www.medic.tula.ru	+7 (4872) 48-49-58
ДЦ «МедЭксперт», г. Воронеж	www.med-exp.ru	8 (800) 333-08-00
КДЛ ООО «РЕААЛ МЕД», г. Воронеж	www.realmed.ru	+7 (473) 207-03-37
Медицинская фирма «Здоровье», г. Воронеж	www.firma-zdorovie.ru	+7 (473) 248-15-92
МЦ «Диагностика плюс», г. Воронеж	www.diagnostika-plus.ru	+7 (473) 221-91-91
МЦ «Медикалаб», г. Воронеж	www.medika-vrn.ru	+7 (473) 260-22-80
МЦ «МедикаСС», г. Воронеж	www.medikacc.ru	+7 (473) 254-80-97
МЦ «Медицинская лабораторная диагностика», г. Тамбов	www.mld-tmb.ru	+7 (475) 247-48-47
МЦ «Новые Медицинские Технологии», г. Воронеж	www.nmtmed.ru	+7 (473) 246-00-60
Областная больница Св. Иоасафа, г. Белгород	www.belokb.belzdrav.ru	+7 (4722) 50-48-96
ОБУЗ «Перинатальный центр», КДЛ, г. Курск	www.opckursk.ru	
Подразделение КДЛ «ПЦР-диагностика «БУЗ ВО "ВГКП № 7"», г. Воронеж	www.zdrav36.ru/gor-pk7	+7 (951) 541-02-24
ЦМД «Центр Молекулярной диагностики», г. Липецк	www.cmd48.ru	+7 (904) 281-75-14 +7 (474) 246-01-14
Южный Федеральный Округ		
Лаборатория АРККВД г. Майкоп	www.arkkvd.ru	+7 (8772) 54-99-61
Лаборатория ФГБУ «РНИИАП» МЗРФ, г. Ростов-на-Дону	www.rniiap.ru	+7 (863) 227-51-98
Медико-биологический Центр, г. Краснодар	www.kmbc.ru	+7 (861) 277-76-02
НУЗ ДКБ на ст. Ростов – Главный ОАО РЖД	www.dor-clinicrostov.ru	+7 (863) 238-38-36 +7 (863) 291-73-95
Областной консультативно-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону	www.rokdc.ru	+7 (863) 227-00-00
Шахтинский Кожно-венерологический диспансер	www.shkvd.ru	+7 (86362) 2-66-10
Областной КВД, г. Ростов-на-Дону	www.kvdro.ru	+7 (863) 282-20-32
ЦМР, г. Краснодар	www.bagk-med.ru	+7 (861) 257-04-53
Лаборатория «Оптимум», г. Сочи	www.analizy-sochi.ru	8 (800) 700-47-28 +7 (862) 291-87-88

О чем говорят
мужчины?

О чем мечтают
женщины?

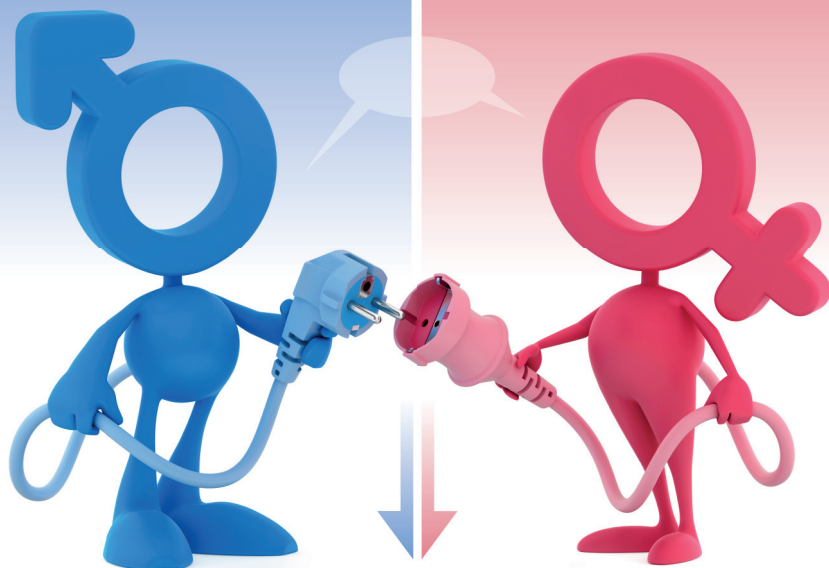

Любовь – это энергия жизни. Роберт Браунинг

Инновационные разработки для клинической практики

Андрофлор®

количественный ПЦР-анализ
репродуктивно значимых инфекций

Генетические исследования

выявление наследственных факторов
нарушения репродукции

Фемофлор®

диагностикум микрофлоры,
победитель премий «Призвание» и Prix Galien Russia

ИммуКвантэкс®

оценка локального воспаления

Квант

количественный тест на 21 тип ВПЧ

Пол плода/Резус-фактор плода

неинвазивное определение по крови матери

25 лет
днк-технология

www.dna-technology.ru
mail@dna-technology.ru
8 (495) 640-17-71, 8 (800) 200-75-15