



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
методом обратной транскрипции (ОТ)
и полимеразной цепной реакции

ОТ-ГЕПАТОГЕН-С

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2008/03892 от 15 ноября 2016 года

Каталожные номера:

R3-P603-23/9 (пробирки 0,2 мл, формат «Real-time»)

R3-P603-S3/9 (стрипы 0,2 мл, формат «Real-time»)

F3-P603-51/1(пробирки 0,5 мл, формат «FLASH»)

F3-P603-21/1(пробирки 0,2 мл, формат «FLASH»)

E3-P603-50/1(пробирки 0,5 мл, формат «Форез»)

E3-P603-20/1(пробирки 0,2 мл, формат «Форез»)

ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед началом работы

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ	4
2	ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА	4
2.1	Принцип действия	4
2.2	Количество тестов	6
2.3	Состав набора	6
2.4	Время проведения анализа	7
3	АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
4	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8
5	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	9
6	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ	11
6.1	Взятие образцов периферической крови	11
6.2	Транспортирование и хранение исследуемого материала	12
6.3	Получение плазмы крови	12
7	ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА	12
7.1	Выделение РНК из плазмы крови	12
7.2	Проведение реакции обратной транскрипции	15
7.3	Подготовка и проведение полимеразной цепной реакции	17
8	СОЗДАНИЕ ТЕСТА (ПРОТОКОЛА) ДЛЯ ДЕТЕКТИРУЮЩИХ АМПЛИФИКАТОРОВ ПРИ ПЕРВОЙ ПОСТАНОВКЕ НА ДАННОМ КОМПЬЮТЕРЕ	21
8.1	Для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96	21
8.2	Для прибора iQ	22
8.3	Для прибора iQ5	23
9	ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА С ТЕСТОМ (ПРОТОКОЛОМ)	25
9.1	Для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96	25
9.2	Для прибора iQ	28
9.3	Для прибора iQ5	31
10	РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ	35
10.1	Регистрация результатов амплификации с использованием детектора флуоресценции «Джин» или «Джин-4» (формат «FLASH»)	35
10.2	Регистрация результатов амплификации (формат «Real-time»)	35
10.3	Регистрация результатов амплификации с использованием электрофореза	40
11	УЧЁТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ	42
12	УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА	44
13	УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ	45
14	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	45
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	46
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	47

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
методом обратной транскрипции (ОТ)
и полимеразной цепной реакции
ОТ-ГЕПАТОГЕН-С

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1** Набор реагентов ОТ–ГЕПАТОГЕН-С для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции предназначен для выявления РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР).
- 1.2** Набор может быть использован в клиничко-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для диагностики вируса гепатита С *in vitro*.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1 Принцип действия

Принцип метода основан на использовании процесса обратной транскрипции РНК и последующей амплификации кДНК, заключающейся в повторяющихся циклах температурной денатурации ДНК, отжига праймеров с комплементарными последовательностями и последующей достройки полинуклеотидных цепей с этих праймеров Taq-полимеразой.

Для повышения чувствительности и специфичности реакции предусмотрено применение «горячего» старта, который обеспечивается методикой приготовления реакционной смеси, состоящей из двух слоёв, разделённых прослойкой из парафина. Смешение слоёв и превращение их в амплификационную смесь происходит только после плавления парафина, что исключает неспецифический отжиг праймеров на ДНК-мишени при начальном прогреве пробирки.

В наборах в формате «FLASH» и «Real-time» в реакционную смесь для амплификации введены ДНК-зонды, каждый из которых содержит флуоресцентную метку и гаситель флуоресценции. При образовании специфичного продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на флуоресцентную метку прекращается, что ведёт к возрастанию уровня флуоресценции. Количество разрушенных зондов (а, следовательно, и уровень флуоресценции) увеличивается пропорционально количеству образовавшихся специфических ампликонов и измеряется на каждом цикле амплификации.

Исследование с использованием набора реагентов ОТ–ГЕПАТОГЕН-С состоит из следующих этапов: выделение РНК (пробоподготовка), реакция обратной транскрипции, ПЦР-амплификация кДНК HCV в режиме реального времени.

На стадии выделения РНК в реакционную смесь добавляют внутренний контрольный образец (РНК-ВК), предназначенный для оценки эффективности всех этапов исследования.

В состав ДНК-зондов, использующихся для детекции продукта амплификации искомой кДНК, включена флуоресцентная метка Fam. В состав ДНК-зондов, использующихся для детекции продукта амплификации внутреннего контрольного образца (РНК-ВК), входит флуоресцентный краситель Hex (таблица 1).

Т а б л и ц а 1 - Каналы детекции продуктов амплификации

Fam	Hex	Rox	Cy5	Cy5.5
HCV	РНК-ВК	-	-	-

Использование нескольких флуоресцентных красителей позволяет сократить количество пробирок, поскольку появляется возможность одновременно регистрировать результаты разных реакций амплификации, проходящих в одной пробирке.

2.2 Для анализа продуктов ПЦР можно также использовать метод электрофореза в агарозном геле. Набор рассчитан на проведение 96/100 определений, включая анализ неизвестных образцов, положительных контрольных образцов и отрицательных контрольных образцов.

2.3 Состав набора

Набор состоит из следующих комплектов:

1. Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК)¹ включает:

- лизирующий раствор – 1 флакон (30 мл);
- реагент для преципитации – 1 флакон (40 мл);
- промывочный раствор №1 – 1 флакон (50 мл);
- промывочный раствор №2 – 1 флакон (30 мл);
- буфер для растворения – 4 пробирки (по 1,25 мл);
- отрицательный контрольный образец – 2 пробирки (по 1,5 мл);
- внутренний контрольный образец (РНК-ВК) – 1 пробирка (1,0 мл);
- внутренний контрольный образец (ДНК-ВК) – 1 пробирка (1,0 мл).

2. Комплект реагентов для обратной транскрипции включает:

- буферный раствор для обратной транскрипции «ОТ-буфер» – 1 пробирка (200 мкл);
- смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ) и праймеров для обратной транскрипции «Праймеры ОТ-NAV+HCV+HDV+HGV+HIV и дНТФ» – 1 пробирка (100 мкл);
- обратную транскриптазу – 1 пробирка (50 мкл).

¹ - включается в набор по запросу.

3. Комплект реагентов для ПЦР-амплификации включает:

- смесь для амплификации, запечатанную парафином – 100 пробирок² (по 20 мкл) для форматов «FLASH» и «Форез», 96 пробирок (по 20 мкл) или 12 стрипов по 8 пробирок (по 20 мкл) для формата «Real-time»;
 - полимеразу ТехноТaq – 1 пробирка (50 мкл);
 - ПЦР-буфер – 2 пробирки (по 500 мкл);
 - минеральное масло – 2 пробирки (по 1,0 мл);
 - положительный контрольный образец – 1 пробирка (150 мкл).
4. Дополнительно, по запросу потребителей возможна поставка **комплекта реагентов для детекции ДНК методом гель-электрофореза**, комплект включает:
- смесь для электрофореза – 1 пакет (9,55 г);
 - агарозный гель – 5 пластин.

В зависимости от способа детекции результатов амплификации набор выпускается в трёх форматах:



Формат «FLASH» предназначен для детекции результатов ПЦР после окончания амплификации с использованием ПЦР-детектора (флуоресцентная детекция по конечной точке).



Формат «Real-time» предназначен для детекции результатов ПЦР во время амплификации с помощью детектирующих амплификаторов (в режиме реального времени).



Формат «Форез» предназначен для детекции результатов ПЦР после окончания амплификации методом электрофореза в агарозном геле.

2.4 Время проведения анализа – 5 часов.

² - комплекты реагентов для ПЦР-амплификации в зависимости от наименования выпускаются в пробирках 0,5 и 0,2 мл.

3 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Специфичность анализа

Набор реагентов выявляет следующие генотипы HCV: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6.

В образцах биологического материала человека, содержащих РНК вируса гепатита С, ПЦР-детектор (формат «FLASH») или детектирующий амплификатор (формат «Real-time») должен регистрировать положительный результат. При использовании метода гель-электрофореза (формат «Форез») должна быть видна полоса оранжево-красного цвета, соответствующая фрагменту генома вируса гепатита С размером 253 п.н. (пар нуклеотидов).

В образцах биологического материала, не содержащих РНК вируса гепатита С, ПЦР-детектор или детектирующий амплификатор должен регистрировать отрицательный результат. При использовании метода гель-электрофореза полоса оранжево-красного цвета, соответствующая фрагменту генома вируса гепатита С размером 253 п.н. (пар нуклеотидов) отсутствует, а полоса, соответствующая внутреннему контрольному образцу размером 480 п.н., должна быть отчётливо видна.

3.2 Чувствительность анализа: 200 копий на 1,0 мл плазмы.

3.3 Диагностическая чувствительность: 99,8%.

3.4 Диагностическая специфичность: 100%.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Организация работы ПЦР-лаборатории, оборудование и материалы должны соответствовать Методическим указаниям МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности» и санитарно-эпидемиологическим правилам СП 1.3 3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)». Исследуемые образцы рассматриваются как потенциально-опасные.

Утилизировать неиспользованные реактивы, реагенты с истекшим сроком годности, а также использованные реагенты и биологический материал необходимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Примечание – Набор реагентов **не содержит** материалов биологического происхождения, веществ в концентрациях, обладающих канцерогенным, мутагенным действием, а также влияющих на репродуктивную функцию человека. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности является безопасным.

5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

При работе с набором реагентов ОТ–ГЕПАТОГЕН-С требуются следующие оборудование и материалы:

- бокс биологической (микробиологической) безопасности II класса;
- ПЦР-бокс;
- обычный амплификатор (термостат программируемый для проведения ПЦР анализа четырёхканальный Терцик, термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1 (ООО «НПО ДНК-Технология») или аналогичные для наборов в формате «FLASH») или детектирующий амплификатор (ДТлайт³, ДТпрайм⁴ и ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология») или амплификаторы iCycler iQ и iQ5 (Bio-Rad Laboratories) для наборов в формате «Real-time»);
- детектор флуоресцентный Джин или Джин-4 (для наборов в формате «FLASH»);
- центрифуга для пробирок объёмом 1,5 мл, с RCF не ниже 16 000 x g;
- термостат твердотельный, поддерживающий температуру от 40 °С до 95 °С;

³ – только модели 4S1, 4S2, 5S1, 5S2, 6S1, 6S2.

⁴ – только модели 4M1, 4M3, 4M6, 5M1, 5M3, 5M6, 6M1, 6M3, 6M6.

- микроцентрифуга-вортекс;
- холодильник бытовой с морозильной камерой;
- пробирки микроцентрифужные объёмом 1,5 мл;
- штатив «рабочее место» для пробирок объёмом 1,5 мл;
- штатив «рабочее место» для пробирок объёмом 0,2 мл или для стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл;
- вакуумные пластиковые пробирки типа Vacuette с ЭДТА или цитратом натрия;
- аспиратор с колбой-ловушкой для удаления надсадочных жидкостей;
- дозаторы электронные с адаптером или дозаторы механические переменного объёма одноканальные со сменными наконечниками, позволяющие отбирать объём жидкости 0,5-10 мкл, 2,0-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл;
- одноразовые наконечники с фильтром, свободные от РНКаз и ДНКаз, объёмом 20 мкл, 200 мкл, 1000 мкл;
- одноразовые наконечники без фильтра, свободные от РНКаз и ДНКаз, для аспиратора с колбой-ловушкой;
- одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные;
- контейнер с дезинфицирующим раствором для сброса использованных наконечников, пробирок и других расходных материалов.

Программное обеспечение для детекторов флуоресцентных:

- детектор флуоресцентный «Джин» – версия программного обеспечения не ниже 3.3, рекомендуемая версия 4.4.0.10.
- детектор флуоресцентный «Джин 4» – версия программного обеспечения не ниже 4.4.0.8, рекомендуемая версия 4.4.0.10.

Программное обеспечение для амплификаторов детектирующих ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96:

- версия ПО не ниже 7.3⁵.
- файл с параметрами анализа «HBV_HCV.ini».

ВНИМАНИЕ! Возможность использования других амплификаторов необходимо уточнить у представителя компании «ДНК-Технология».

Для детекции методом электрофореза дополнительно требуются:

- источник постоянного тока;
- устройство для электрофореза нуклеиновых кислот в агарозных и акриламидных гелях УЭФ-01 (ООО «НПО ДНК-Технология») или аналогичное;
- трансиллюминатор ультрафиолетовый (флуоскоп);
- колба мерная вместимостью 1000 мл;
- дистиллированная вода;
- стальная проволока диаметром 1,0 мм;
- маркер длин амплифицированных фрагментов (pUC19 ДНК/MspI).

6 АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Для исследования используют цельную периферическую кровь человека.

6.1 Взятие образцов периферической крови

Взятие цельной периферической крови проводится в вакуумные пластиковые пробирки типа Vacuette объёмом 2,0 или 4,0 мл с добавленной в качестве антикоагулянта динатриевой солью этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) в конечной концентрации 2,0 мг/мл. В качестве антикоагулянта допускается также использование цитрата натрия. Для перемешивания крови с антикоагулянтом после взятия материала необходимо перевернуть пробирку 2–3 раза.

⁵ – производитель рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение для детектирующих амплификаторов. Актуальную версию программного обеспечения можно скачать на сайте компании «ДНК-Технология»: <https://dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya>

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование гепарина в качестве антикоагулянта.

6.2 Транспортирование и хранение исследуемого материала

ВНИМАНИЕ! Время от взятия материала до получения плазмы не должно превышать 6 часов.

Транспортировать и хранить образцы крови до начала исследования при температуре от 2 °С до 8 °С.

ВНИМАНИЕ! Цельную кровь нельзя замораживать.

6.3 Получение плазмы крови

6.3.1 Пробирки с кровью центрифугируйте при 800-1600 x g (соответствует 3000-4100 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 20 мин при комнатной температуре (от 18 °С до 25 °С).

ВНИМАНИЕ! Относительное ускорение центрифуги (RCF или g) зависит от частоты вращения и радиуса центрифугирования (Приложение Б). Для определения соответствия центрифуги заданным параметрам центрифугирования обратитесь к руководству по эксплуатации.

6.3.2 После центрифугирования отберите дозатором верхнюю фракцию (плазма) и перенесите в отдельную пластиковую пробирку объемом 1,5 мл.

Допускается хранение полученной плазмы при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С не более 3 месяцев.

7 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1 Выделение РНК из плазмы крови

Примечания

1. Перед началом работы необходимо достать из холодильника комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот и проконтролировать отсутствие осадка в лизирующем растворе. В случае выпадения осадка лизирующий раствор прогреть при 65 °С до полного растворения осадка. Затем перемешать лизирующий раствор переворачиванием флакона вверх дном 5-10 раз, избегая пенообразования.
2. На данном этапе используйте только наконечники с фильтром, свободные от РНКаз и ДНКаз.

3. При одновременном исследовании образца на наличие инфекций, вызванных РНК-содержащими (HCV и HIV) и ДНК-содержащими (HBV) вирусами, необходимо на стадии пробоподготовки внести два внутренних контроля (РНК-ВК+ДНК-ВК).

7.1.1 Подготовьте образцы:

- образцы плазмы, хранившиеся при температуре минус 18 °С и ниже, разморозьте при комнатной температуре или при температуре от 2 °С до 8 °С, перемешайте на микроцентрифуге-вортексе и центрифугируйте 5 мин при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424). Для исследования необходимо использовать надосадочную жидкость, не затрагивая осадка (при его наличии).
- образцы плазмы, хранившиеся при температуре от 2 °С до 8 °С, а также отрицательный контрольный образец и РНК-ВК перемешайте и центрифугируйте в течение 1–3 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.1.2 Промаркируйте необходимое количество новых пластиковых пробирок объемом 1,5 мл с учётом пробирки для отрицательного контрольного образца «К–».

Например, для исследования 10 образцов необходимо промаркировать 11 пробирок (10 пробирок для исследуемых образцов и одна пробирка «К–»).

7.1.3 Внесите во все промаркированные пробирки по 10 мкл предварительно перемешанного внутреннего контрольного образца (РНК-ВК).

7.1.4 Добавьте в каждую пробирку по 300 мкл лизирующего раствора, не касаясь края пробирки. Закройте крышки пробирок.

Примечание – Для предотвращения контаминации следует перед внесением образцов открывать крышку только той пробирки, в которую будет вноситься данный образец, и закрывать ее перед внесением следующего.

7.1.5 Внесите по 100 мкл предварительно перемешанной плазмы в пробирки для исследуемых образцов. В пробирку, промаркированную «К–», внесите 100 мкл отрицательного контрольного образца.

ВНИМАНИЕ! Пробирки с исследуемыми образцами и отрицательным контрольным образцом необходимо обрабатывать по единой схеме.

- 7.1.6 Плотнo закройте крышки пробирок, встряхните на вортeксе в течение 3–5 с дважды и осадите капли на микроцентрифуге-вортeксе в течение 3-5 с при комнатной температуре.
- 7.1.7 Термостатируйте пробирки при температуре 65 °C в течение 15 мин, осадите конденсат центрифугированием при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 30 с при комнатной температуре.
- 7.1.8 Добавьте в каждую пробирку по 400 мкл реагента для преципитации, встряхните на вортeксе в течение 3–5 с дважды.
- 7.1.9 Центрифугируйте пробирки при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 15 мин при комнатной температуре.
- 7.1.10 Не задевая осадок, полностью удалите надосадочную жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
- 7.1.11 Добавьте к осадку 500 мкл промывочного раствора №1 и 3–5 раз аккуратно переверните пробирки. Необходимо переворачивать каждую пробирку индивидуально.
- 7.1.12 Центрифугируйте пробирки при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 5 мин при комнатной температуре.
- 7.1.13 Не задевая осадок, полностью удалите надосадочную жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
- 7.1.14 Добавьте к осадку 300 мкл промывочного раствора №2 и 3–5 раз аккуратно переверните пробирки. Необходимо переворачивать каждую пробирку индивидуально.
- 7.1.15 Центрифугируйте пробирки при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 5 мин при комнатной температуре.
- 7.1.16 Не задевая осадок, полностью удалите надосадочную жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).

- 7.1.17 Откройте крышки пробирок и высушите осадок при температуре 65 °С в течение 5 мин.
- 7.1.18 Добавьте к осадку 16,5 мкл буфера для растворения, закройте крышки пробирок. Осадите капли центрифугированием пробирок в течение 3–5 с на микроцентрифуге-вортексе.
- 7.1.19 Прогрейте пробирки при температуре 65 °С в течение 10 мин. Осадите капли центрифугированием пробирок при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 30 с при комнатной температуре.

Полученный препарат РНК необходимо в течение 30 мин использовать для постановки реакции обратной транскрипции, так как препарат РНК не подлежит хранению.

Примечания

1. При необходимости постановки анализов на несколько инфекций для одного и того же образца осадок следует растворить в 25 мкл буфера для растворения.
2. Для проведения обратной транскрипции необходимо использовать 16,5 мкл препарата НК.
3. Для ПЦР–амплификации ДНК гепатита В необходимо использовать 5,0 мкл из оставшегося объема препарата НК.

ВНИМАНИЕ! Увеличение объема буфера для растворения приводит к пропорциональному разбавлению образца и уменьшению чувствительности анализа.

7.2 Проведение реакции обратной транскрипции

- 7.2.1 Разморозьте содержимое пробирок «ОТ-буфер» и «Праймеры ОТ-HAV+HCV+HDV+HGV+HIV и дНТФ» из комплекта реагентов для обратной транскрипции при комнатной температуре, затем встряхните пробирки и центрифугируйте в течение 3–5 с на микроцентрифуге-вортексе.

Примечание – В случае выпадения осадка в буферном растворе «ОТ-буфер» пробирку следует оставить при комнатной температуре до полного растворения осадка, периодически встряхивая на вортексе.

- 7.2.2 Приготовьте ОТ-смесь. Смешайте в отдельной пробирке:

- 2,0x(N+1) мкл буферного раствора «ОТ-буфер»;

- 1,0x(N+1) мкл праймеров «Праймеры ОТ–HAV+HCV+HDV+HGV+HIV и дНТФ»;
- 0,5x(N+1) мкл обратной транскриптазы,

где N – количество промаркированных пробирок с учётом «К–».

Например, необходимо проанализировать 10 образцов. Промаркированных пробирок – 11. Нужно приготовить смесь ОТ-буфера, праймеров и обратной транскриптазы для 12 (11+1) пробирок, т.е. 24 мкл ОТ-буфера + 12 мкл праймеров + 6 мкл обратной транскриптазы.

ВНИМАНИЕ! Обратную транскриптазу необходимо доставать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

- 7.2.3 Встряхните пробирку с ОТ-смесью на вортексе и центрифугируйте на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с при комнатной температуре.
- 7.2.4 Добавьте по 3,5 мкл ОТ-смеси во все промаркированные пробирки (включая «К–») и перемешайте пипетированием 5-7 раз.
- 7.2.5 Поместите пробирки в термостат и инкубируйте при 40 °С в течение 30 мин, затем прогрейте при 95 °С в течение 5 мин.
- 7.2.6 Осадите капли со стенок пробирок центрифугированием при 16000 x g (соответствует 13000 об/мин на Eppendorf Centrifuge 5424) в течение 30 с при комнатной температуре.

Препарат кДНК готов для проведения ПЦР.

Примечание – Полученный препарат кДНК/ДНК можно использовать также при постановке ПЦР для гепатитов А, D, G и вируса иммунодефицита человека (HIV). В этом случае ПЦР выполняется с использованием индивидуальных для каждой инфекции комплектов реагентов и программ амплификации, указанных в прилагаемом к наборам инструкциях. Учёт и интерпретация результатов выполняется согласно прилагаемым к наборам инструкциям.

При необходимости постановки ПЦР для выявления более четырёх инфекций следует:

1. К полученному препарату кДНК/ДНК добавить 20 мкл буфера для растворения.

2. Пробирки встряхнуть на вортексе в течение 3–5 с.
3. Осадить капли центрифугированием на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с.
4. Перейти к выполнению п.7.3.

Примечание – Допускается хранение кДНК при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С не более одного месяца.

7.3 Подготовка и проведение полимеразной цепной реакции

- 7.3.1 Промаркируйте необходимое количество пробирок со смесью для амплификации, запечатанной парафином, для исследуемых образцов плазмы крови, положительного контрольного образца ДНК (К+) и отрицательного контрольного образца (К–).

Например, необходимо проанализировать 10 образцов. Нужно промаркировать 10 пробирок для исследуемых образцов; одну пробирку для «К–» и одну пробирку для «К+». Общее количество пробирок – 12.

ВНИМАНИЕ! При использовании для учёта результатов амплификации детектора флуоресцентного (формат «FLASH») необходимо промаркировать дополнительно две пробирки с запечатанной парафином смесью для амплификации (всего две нормировочные пробирки «ФОН») для контроля фона флуоресценции.

Например, необходимо проанализировать 10 образцов. Нужно промаркировать 10 пробирок для исследуемых образцов, одну пробирку для «К+», одну пробирку для «К–» и две пробирки «ФОН». Общее количество пробирок – 14.

- 7.3.2 Разморозьте при комнатной температуре ПЦР-буфер из комплекта реагентов для ПЦР-амплификации.
- 7.3.3 Встряхните пробирки с ПЦР-буфером и полимеразой ТехноТaq в течение 3–5 с и осадите капли на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! Полимеразу ТехноТaq необходимо вынимать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

7.3.4 Приготовьте смесь ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТaq. Смешайте в отдельной пробирке:

- 10x(N+1) мкл ПЦР-буфера;
- 0,5x(N+1) мкл полимеразы ТехноТaq,

где N – количество промаркированных пробирок с учетом «К–» и «К+».

Например, необходимо проанализировать 10 образцов. Промаркированных пробирок – 12. Нужно приготовить смесь ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq для 13 (12+1) пробирок, т.е. 130 мкл ПЦР-буфера + 6,5 мкл полимеразы ТехноТaq.

7.3.5 Перемешайте смесь ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТaq в течение 3–5 с и осадите капли на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с при комнатной температуре.

Смесь можно хранить при температуре от 2 °С до 8 °С не более одного часа.

7.3.6 Добавьте во все промаркированные пробирки (за исключением пробирок «ФОН»), не повреждая слой парафина, по 10 мкл смеси ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТaq. В пробирки, маркированные «ФОН», добавьте по 10 мкл ПЦР-буфера.

7.3.7 Добавьте в каждую пробирку по одной капле минерального масла (около 20 мкл). Закройте крышки пробирок.

7.3.8 Встряхните пробирки с препаратом кДНК и осадите капли на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с.

7.3.9 Для предотвращения контаминации следует перед внесением кДНК открывать крышки только тех пробирок, в которые будет вноситься данный образец, и закрывать их перед внесением следующего. Препараты кДНК следует вносить наконечниками с фильтром.

Внесите, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл препарата кДНК в соответствующие пробирки для исследуемых образцов.

- 7.3.10 Внесите, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл отрицательного контрольного образца, прошедшего этап выделения РНК и реакцию обратной транскрипции, в пробирки, промаркированные «К–» и «ФОН». Внесите, не повреждая слой парафина, 5,0 мкл положительного контрольного образца ДНК, в пробирку, промаркированную «К+».
- 7.3.11 Центрифугируйте пробирки на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с при комнатной температуре.
- 7.3.12 Установите все пробирки в амплификатор или термостат программируемый.
- 7.3.12.1 Форматы «Форез» и «FLASH»:

Проведите ПЦР с учётом объёма реакционной смеси, равного 35 мкл, в режиме, приведённом для амплификаторов с активным регулированием (таблица 2).

Примечание – Более подробное описание программирования и управления термостатом «Терцик» содержится в инструкции к прибору (см. «Руководство пользователя»).

Таблица 2 - Режим амплификации для амплификаторов с активным регулированием (Форматы «Форез» и «FLASH»)

Алгоритм регулирования – «быстрый»

№ блока	Для амплификаторов с активным регулированием			Число циклов
	Температура, °C	Время		
		мин	с	
1	94,0	5	00	1
2	94,0	0	10	50
	62,0	0	20	
3	10,0	...	...	хранение

Примечание – При работе с наборами в формате «FLASH» готовые нормировочные пробирки «ФОН» допускается использовать многократно при каждой детекции результатов ПЦР с реакционными пробирками из той же серии комплекта реагентов для ПЦР-амплификации. Нормировочные пробирки следует хранить при температуре от 2 °C до 8 °C не более одного месяца в защищённом от света месте. При проведении детекции пробирки должны иметь комнатную температуру, поэтому за один час до проведения детекции их необходимо достать из холодильника.

7.3.12.2 Формат «Real-time»

Для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96:

Запустите программное обеспечение RealTime_PCR в режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР загрузите файл «HBV_HCV.ini» (8.1). Далее и при последующих постановках добавьте в протокол тест «HBV_HCV» (9.1), укажите количество и идентификаторы образцов, отметьте расположение пробирок на матрице термоблока в соответствии с их установкой (9.1.6) и проведите ПЦР.

При выборе теста «HBV_HCV» в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 3.

Таблица 3 - Программа амплификации для детектирующих амплификаторов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96

№ блока	Температура, °C	мин	с	Число циклов	Режим оптических измерений	Тип блока
1	94,0	5	00	1		Цикл
2	94,0	0	10	50		Цикл
	62,0	0	20		√	
3	10,0	...	...	Хранение		Хранение

Для приборов iQ и iQ5:

Включите прибор и блок питания оптической части прибора, оставьте для прогрева на 30 минут. Запустите программное обеспечение iCycler (или Bio-Rad iQ5). При первой постановке создайте и сохраните новый протокол (8.2, 8.3). При последующих постановках выберите сохраненный протокол, настройте конфигурацию плашки (файл с данными о характеристике образцов и их расположении в плашке) (9.2, 9.3) и проведите ПЦР с учётом объёма реакционной смеси, равного 35 мкл.

8 СОЗДАНИЕ ТЕСТА (ПРОТОКОЛА) ДЛЯ ДЕТЕКТИРУЮЩИХ АМПЛИФИКАТОРОВ ПРИ ПЕРВОЙ ПОСТАНОВКЕ НА ДАННОМ КОМПЬЮТЕРЕ

8.1 Для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96

Версия ПО не ниже 7.3⁶.

Примечание – Для иллюстраций в настоящей инструкции использованы скриншоты версий 7.9.5.15.

Тест «HBV_HCV» (файл HBV_HCV.ini) для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 предоставляется производителем набора.

Его установку в программу RealTime_PCR необходимо производить в режиме «Работа с прибором» в следующем порядке:

8.1.1 Откройте программное обеспечение RealTime_PCR, выберите оператора, который будет работать с набором ОТ–ГЕПАТОГЕН-С, выберите режим «Работа с прибором».

При добавлении нового оператора необходимо создать или выбрать рабочую директорию для сохранения файла с результатами.


8.1.2 В меню «Тест» выберите закладку «Копировать группы тестов».




8.1.3 В левой половине окна «Копировать группы тестов» выберите строку «из *.ini файла», откройте ini файл «HBV_HCV.ini».

⁶ - производитель рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение для детектирующих амплификаторов. Актуальную версию программного обеспечения можно скачать на сайте компании «ДНК-Технология»: <https://dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya>

- 8.1.4 В правой половине окна «Копировать группы тестов» выберите оператора, в директорию которому необходимо скопировать тест «HBV_HCV».

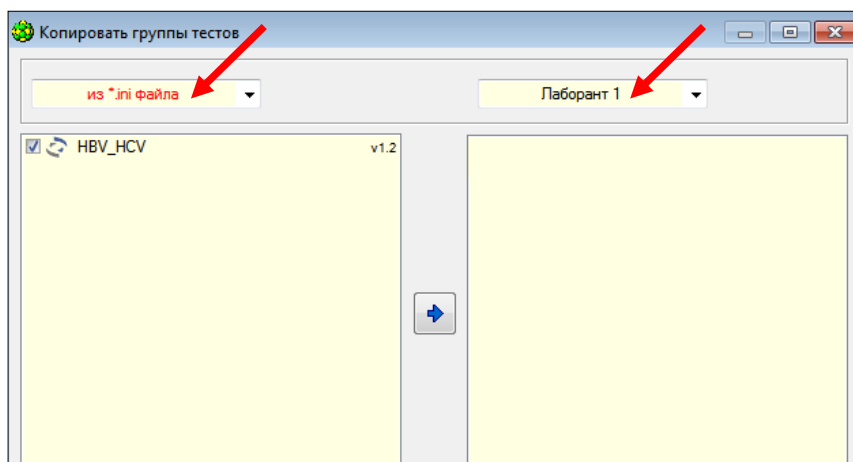

- 8.1.5 Выберите тест для копирования. Нажмите кнопку , после чего выбранный тест появится в правой половине окна.

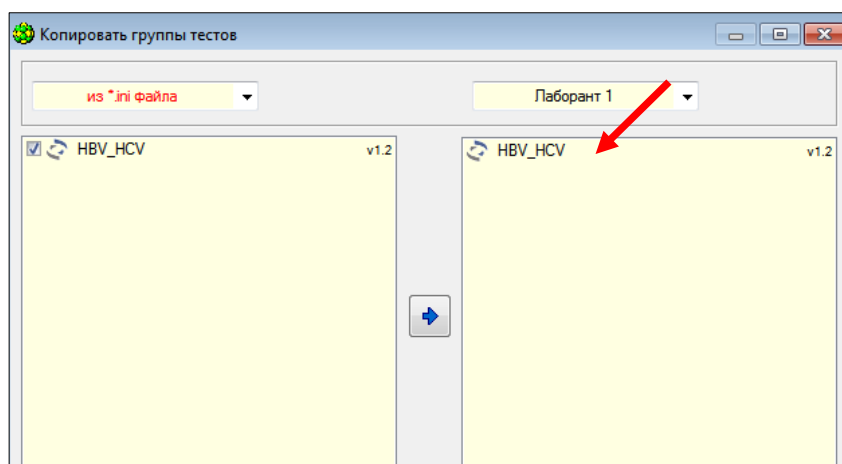

Теперь с тестом «HBV_HCV» может работать оператор, для которого был скопирован тест.

8.2 Для прибора iQ:

- 8.2.1 Откройте программное обеспечение iCycler. Выберите «Library» в левой части окна программы.

8.2.2 Отредактируйте и сохраните файл dynamicwf.tmo (таблица 4).

8.2.3 Выберите «Производственный модуль» («Workshop») в левой части окна программы. Создайте и сохраните протокол (файл с программой амплификации) (таблица 4). Созданный файл будет сохранен в модуле «Library».

Примечание – Более подробное описание оформления протокола содержится в инструкции к прибору (см. «Руководство пользователя» для iCycler iQ).

Таблица 4 - Режим амплификации для детектирующего амплификатора iCycler iQ (Bio-Rad Laboratories)

Cycle	Repeats	Step	Dwell Time	Setpoint, °C	PCR/Melt Data Acquisition
Программа для считывания динамических факторов лунок dynamicwf.tmo.					
1	1				
		1	00:30	80,0	
		2	05:00	94,0	
2	5				
		1	00:20	94,0	
		2	00:30	62,0	
3	2				
		1	00:20	80,0	Real Time
Программа амплификации					
4	45				
		1	00:10	94,0	
		2	00:20	62,0	Real Time
5		...	...	10,0	storage

8.3 Для прибора iQ5:

8.3.1 Откройте программное обеспечение Bio-Rad iQ5. Выберите «Производственный модуль» («Workshop») в левой части окна программы (при запуске программы открывается автоматически).

8.3.2 Нажмите кнопку «Protocol» для активации окна «Selected protocol» («Выбранный протокол»).

8.3.3 В окне «Selected protocol» нажмите кнопку «Create new» для создания нового протокола (файла с программой амплификации). Откроется окно «Editing Protocol» («Редактирование протокола»).

- 8.3.4 В поле «Editing protocol» введите название протокола.
- 8.3.5 Убедитесь, что все кнопки в области «Show Options» («Показать параметры») неактивны (то есть выключены).
- 8.3.6 Создайте протокол в электронной таблице, расположенной в нижней части окна «Editing Protocol» (таблица 5).

Таблица 5 - Программа амплификации для детектирующего амплификатора iCycler iQ5 (при использовании Persistent Well Factor)

Cycle	Repeats	Step	Dwell Time	Setpoint, °C	PCR/Melt Data Acquisition
1	1				
		1	05:00	94,0	
2	50				
		1	00:10	94,0	
		2	00:20	62,0	Real Time
3	1				
		1	01:00	10,0	

- 8.3.7 Сохраните протокол, для этого нажмите на кнопку «Save & Exit Protocol Editing» («Сохранить и покинуть редактирование протокола»). Проверьте название протокола в диалоговом окне «Save As» («Сохранить как»), затем нажмите кнопку «Save» («Сохранить»).

Примечание – Вы можете выйти из Редактора протокола, нажав кнопку «Save & Exit Protocol Editing» или «Cancel & Exit Protocol Editing» («Отменить и выйти из редактирования протокола»).

Более подробное описание оформления протокола содержится в инструкции к прибору (см. «Руководство пользователя» для iCycler iQ5).

ВНИМАНИЕ! При использовании других амплификаторов, свяжитесь с представителем компании для уточнения программы амплификации.


Примечание – Продукты амплификации можно хранить при температуре от 2 °C до 8 °C не более одного месяца или при температуре от минус 18 °C до минус 22 °C не более 12 месяцев.

9 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА С ТЕСТОМ (ПРОТОКОЛОМ)


9.1 Для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96:

9.1.1 Откройте программное обеспечение RealTime_PCR, выберите оператора, для которого сохранили тест (8.1.1), выберите режим «Работа с прибором».

9.1.2 Нажмите кнопку «Добавить тест».

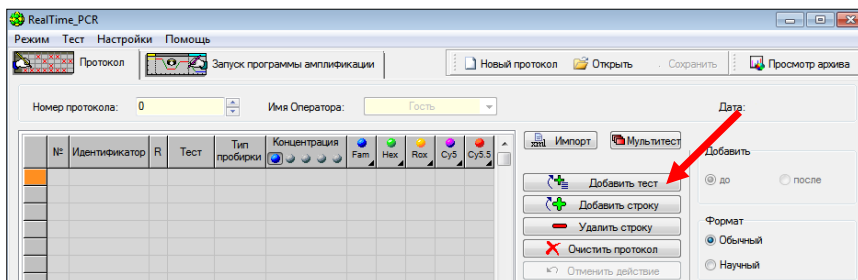

9.1.3 Выберите из списка тест «HBV_HCV».

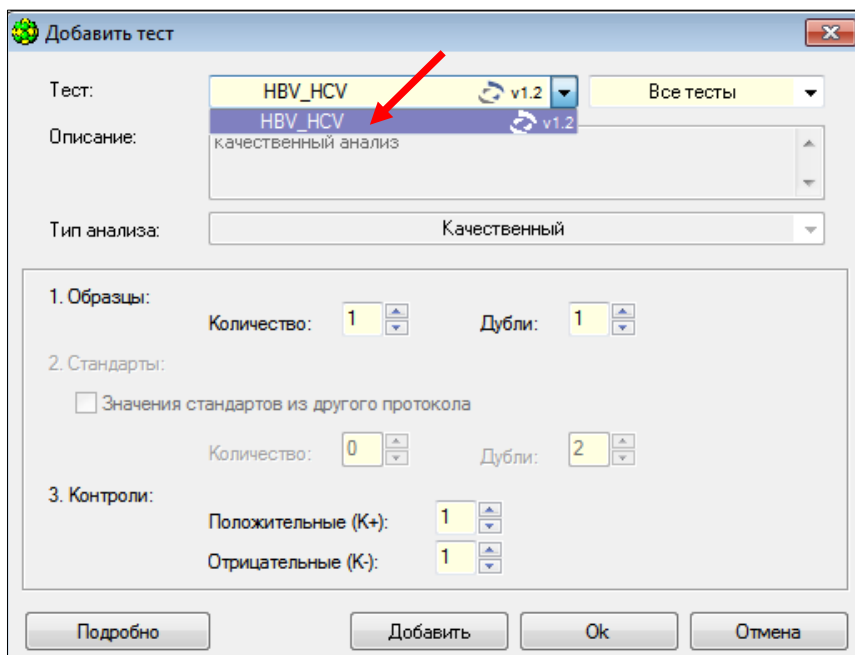

9.1.4 Укажите количество исследуемых образцов (в графе «Дубли» поставьте цифру 1), нажмите кнопку «Ок».

Добавить тест

Тест: **HBV_HCV** v1.2 Все тесты

Описание: качественный анализ

Тип анализа: Качественный

1. Образцы:

Количество: 10 Дубли: 1

2. Стандарты:

☐ Значения стандартов из другого протокола

Количество: 0 Дубли: 2

3. Контроли:

Положительные (К+): 1

Отрицательные (К-): 1

Подробнее Добавить Ок Отмена

9.1.5 Укажите идентификаторы пробирок.

Импорт **Мультитест**

Добавить: ☐ до ☐ после

Формат: ☒ Обычный ☐ Научный

Добавить тест

Добавить строку

Удалить строку

Очистить протокол

Отменить действие




№	Идентификатор	Тест	Тип пробирки	Концентрация	Fam	Hex	Rox	Cy5	Cy5.5
A1	1	Образец_1	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A2	2	Образец_2	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A3	3	Образец_3	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A4	4	Образец_4	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A5	5	Образец_5	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A6	6	Образец_6	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A7	7	Образец_7	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A8	8	Образец_8	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A9	9	Образец_9	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A10	10	Образец_10	☐ HBV_HCV			✓	✓	-	-
A11	11	К+	☐ HBV_HCV	К+		✓	✓	-	-
A12	12	К-	☐ HBV_HCV	К-		✓	✓	-	-


Автозаполнение ☒

Порядок заполнения: ☐ Свободное заполнение


Очистить поле матрицы

Применить Отмена

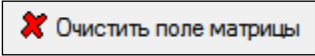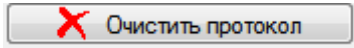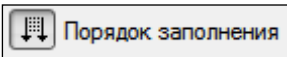9.1.6 Отметьте расположение пробирок на матрице термоблока в соответствии с их установкой (при ошибочном заполнении нажмите кнопки «Очистить поле матрицы» –  или «Очистить протокол» –  и «Порядок заполнения» – ).

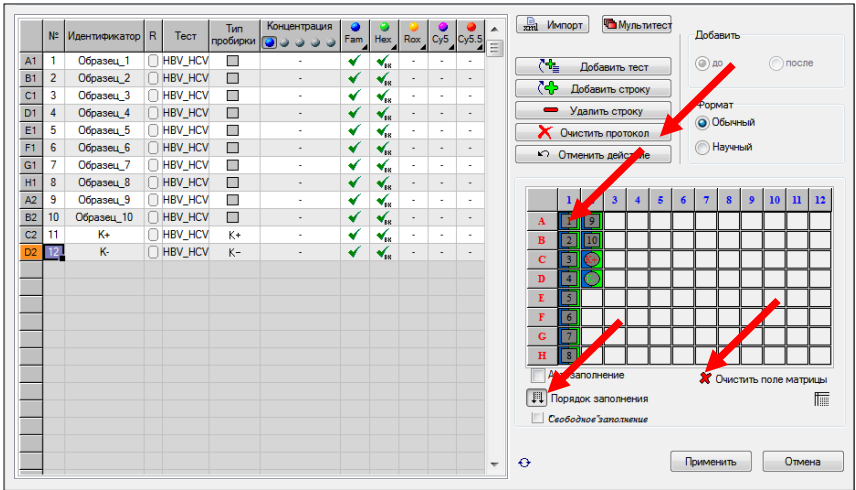


Если термоблок не заполнен полностью, рекомендуется устанавливать пробирки по центру термоблока для равномерного прижима пробирок нагревающей крышкой термоблока.

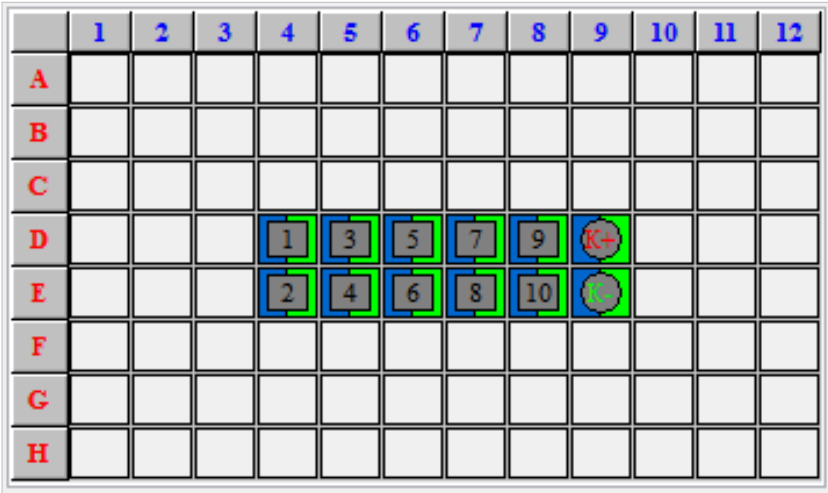

9.1.7 Нажмите кнопку «Применить» в правом нижнем углу окна «Протокол».

В окне «Запуск программы амплификации» будет отображена необходимая программа амплификации.

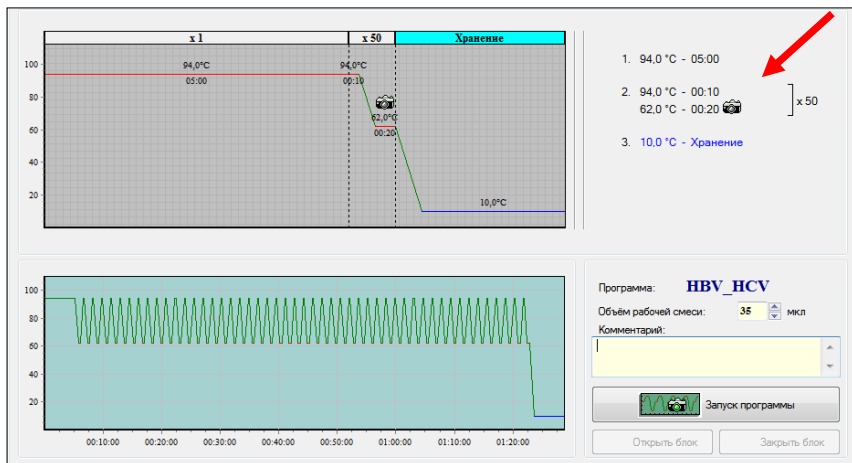


9.1.8 Нажмите кнопку «Запуск программы» в правом нижнем углу окна.

9.1.9 Укажите имя файла и директорию на компьютере для сохранения файла с результатами (по умолчанию будет предложено сохранить файл в рабочую директорию выбранного оператора (8.1.1)).


9.2 Для прибора iQ:

9.2.1 Откройте программное обеспечение iCycler. Для постановки ПЦР необходимо создать новый файл настройки плашки. Для этого нажмите на вкладку «View Plate Setup» в «Workshop» и создайте или отредактируйте файл конфигурации плашки.


9.2.2 Выберите вкладку «Samples: Whole plate loading», укажите расположение пробилок в термоблоке (исследуемые образцы, положительный и отрицательный контрольные образцы).

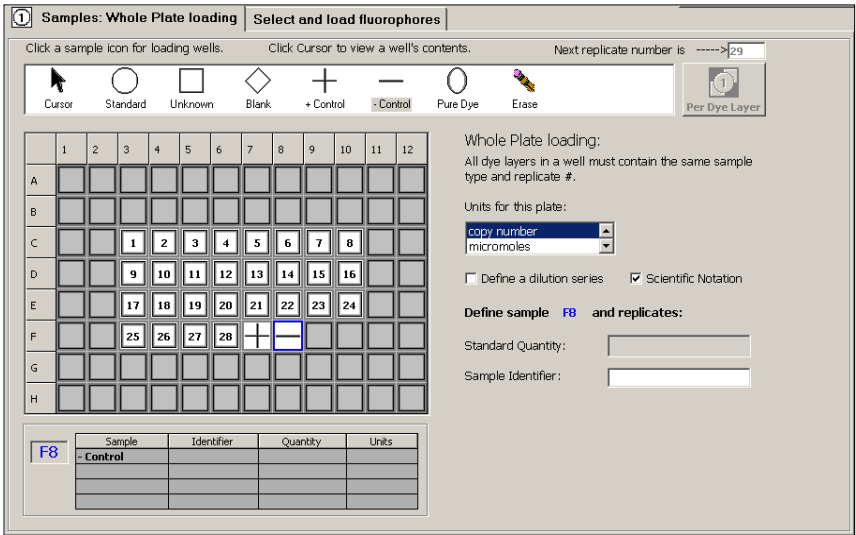


9.2.3 Укажите идентификаторы образцов. Идентификаторы можно указывать после заполнения плашки, выделив курсором нужный образец.

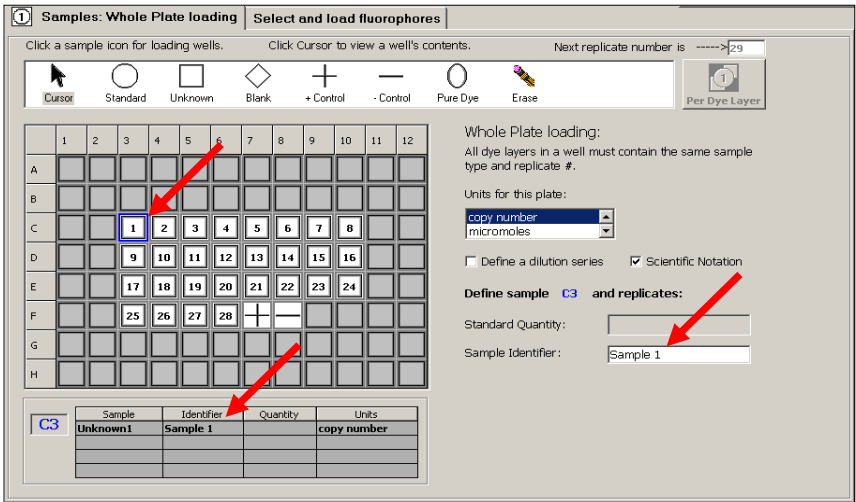

9.2.4 Нажмите на вкладку «Select and load fluorophores». Выберите флуорофоры FAM-490 и HEX-530. В окне 2 выберите соответствующие флуорофорам цвета.

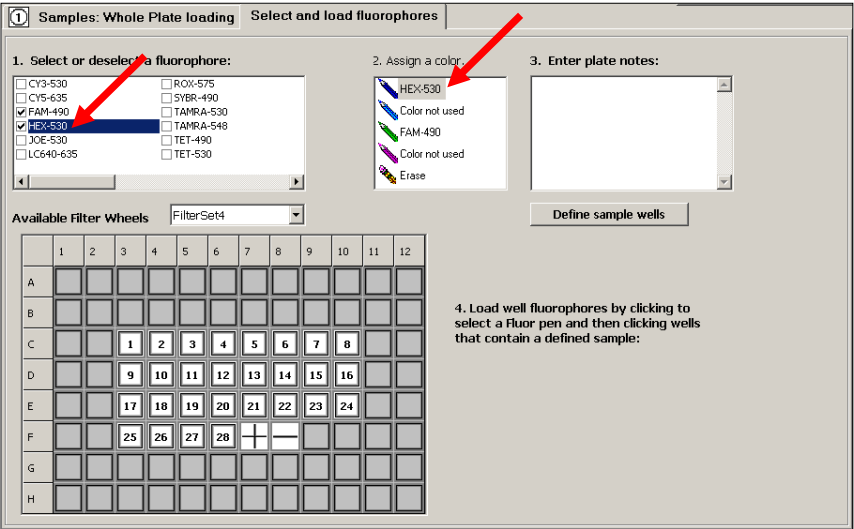

9.2.5 Заполните плашку, отметив оба флуорофора.

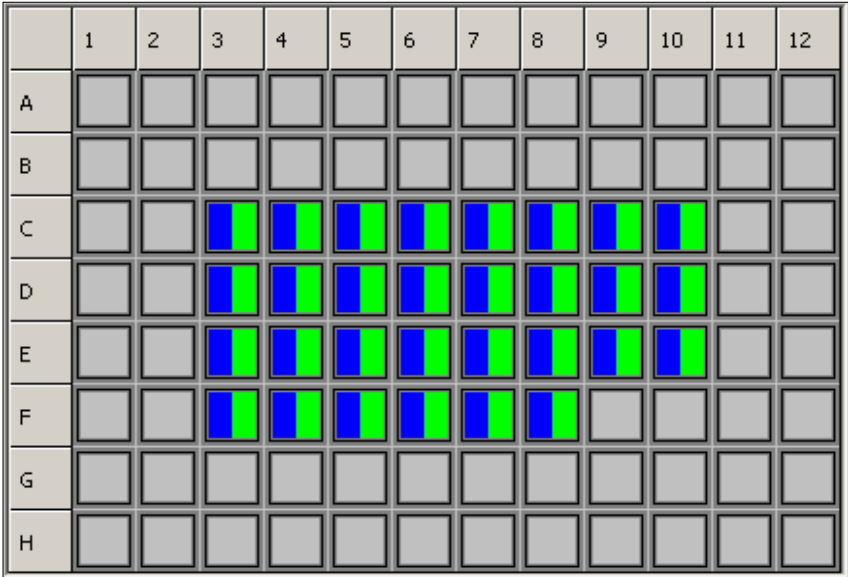

- 9.2.6 Сохраните конфигурацию плашки, введя название файла настройки плашки в поле «Plate Setup Filename» и нажав «Save this plate setup». Созданный файл будет сохранен в модуле «Library».

Примечание – Для последующих постановок можно редактировать сохраненный файл настройки плашки, а не создавать его заново.

- 9.2.7 Выберите в модуле «Library» сохраненный ранее протокол, нажав вкладку «View Protocol». Затем перейдите во вкладку «View Plate Setup», выберите созданный файл настройки плашки. Нажмите кнопку «Run with selected protocol». Будет отображено окно «Run Prep» («Подготовка запуска»).

- 9.2.8 В меню «Select Well factor Source» выберите «Experimental Plate». Проверьте имена файлов протокола амплификации и настроек плашки, убедитесь, что файлы выбраны правильно. Укажите объем реакционной смеси 35 мкл, нажмите «Begin Run» и сохраните в выбранной директории файл сбора и сохранения данных.

Примечание – Более подробное описание работы с прибором содержится в инструкции к прибору (см. «Руководство пользователя» для iCycler).

9.3 Для прибора iQ5:

- 9.3.1 Откройте программное обеспечение Bio-Rad iQ5. Выберите «Производственный модуль» («Workshop») в левой части окна программы. Нажмите кнопку «Protocol» для активации окна «Selected protocol» («Выбранный протокол»).


- 9.3.2 Выберите необходимый каталог в левой части области просмотра файлов. Выберите необходимый файл с протоколом в правой части области просмотра файлов.

После выбора необходимого протокола его графическое и табличное представление отобразится в нижней части окна.

- 9.3.3 После выбора протокола перейдите к настройке конфигурации плашки. В «Производственном модуле» нажмите кнопку «Plate» для активации «Окна конфигурации плашки» («Selected Plate Setup»).

- 9.3.4 Нажмите кнопку «Create New» («Создать новую»), расположенную в нижнем правом окне исходного экрана в «Производственном модуле». Откроется окно «Editing Plate» («Редактирование плашки»).

- 9.3.5 В поле «Editing Plate» введите название файла настройки плашки. Введите объем в поле «Sample Volume» - «35», выберите способ герметизации в поле «Seal Type» и тип пластика в поле «Vessel Type».
- 9.3.6 Включите метку «Whole Plate loading» (активная метка подсвечивается зелёным цветом), нажмите кнопку «Select/Add Fluorophores» («Выбрать/добавить флуорофоры»).
- 9.3.7 В открывшемся окне «Fluor Selector» отметьте флуорофоры FAM и HEX (поставьте галочки в поле «Selected» напротив указанных флуорофоров). Нажмите кнопку «OK» для возврата в окно «Editing Plate».
- 9.3.8 Активируйте кнопку FAM.
- 9.3.9 Укажите расположение неизвестных (исследуемых) образцов, положительного и отрицательного контрольных образцов. Для этого щелкните по пиктограмме типа образца  (неизвестный образец).

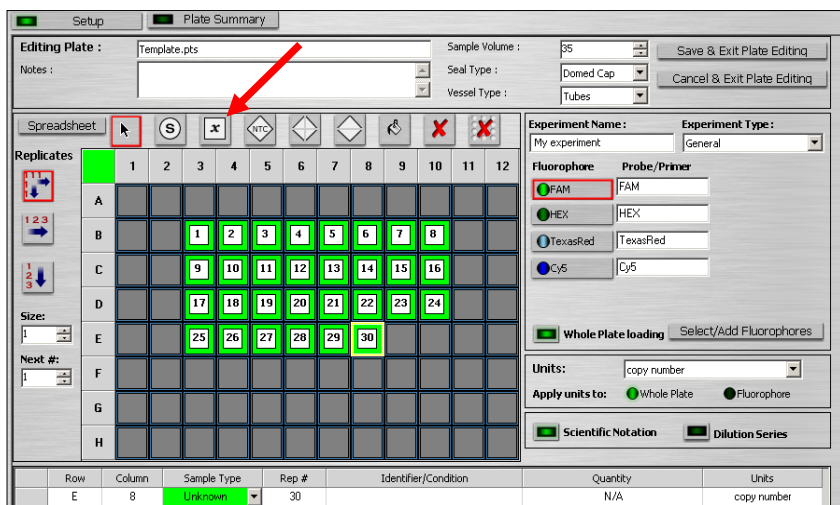

Row	Column	Sample Type	Rep #	Identifier/Condition	Quantity	Units
E	8	Unknown	30		N/A	copy number

ВНИМАНИЕ! Положительный и отрицательный контрольные образцы необходимо указать как неизвестные!

- 9.3.10 Последовательно выделите нужные ячейки курсором и введите в появившуюся внизу таблицу соответствующее обозначение для каждого контрольного образца («Positive control» и «Negative control»).

Setup Plate Summary

Editing Plate : Template.pts Sample Volume : 35 Save & Exit Plate Editing
 Notes : Seal Type : Domed Cap Cancel & Exit Plate Editing
 Vessel Type : Tubes

Spreadsheet

Replicates

Size: 1 Next #: 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B		1	2	3	4	5	6	7	8			
C		9	10	11	12	13	14	15	16			
D		17	18	19	20	21	22	23	24			
E		25	26	27	28	29	30					
F												
G												
H												

Fluorophore: FAM HEX TexasRed Cy5 Probe/Primer: FAM HEX TexasRed Cy5

Whole Plate loading Select/Add Fluorophores

Units: copy number Apply units to: Whole Plate Fluorophore

Scientific Notation Dilution Series

Row	Column	Sample Type	Rep. #	Identifier/Condition	Quantity	Units
E	7	Unknown	31	Positive control	N/A	copy number

9.3.11 Активируйте кнопку HEX.

9.3.12 Выберите пиктограмму заливки плашки , щелкните по темно-зелёному квадрату в левом верхнем углу плашки. Каждая заполненная ячейка в плашке должна быть окрашена в два цвета.

Setup Plate Summary

Editing Plate : Template.pts Sample Volume : 35 Save & Exit Plate Editing
 Notes : Seal Type : Domed Cap Cancel & Exit Plate Editing
 Vessel Type : Tubes

Spreadsheet

Replicates

Size: 1 Next #: 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B		1	2	3	4	5	6	7	8			
C		9	10	11	12	13	14	15	16			
D		17	18	19	20	21	22	23	24			
E		25	26	27	28	29	30					
F												
G												
H												

Fluorophore: FAM HEX TexasRed Cy5 Probe/Primer: FAM HEX TexasRed Cy5

Whole Plate loading Select/Add Fluorophores

Units: copy number Apply units to: Whole Plate Fluorophore

Scientific Notation Dilution Series

Row	Column	Sample Type	Rep. #	Identifier/Condition	Quantity	Units
-----	--------	-------------	--------	----------------------	----------	-------

- 9.3.13 Сохраните настройки плашки, для этого щелкните по кнопке «Save & Exit Plate Editing» («Сохранить и покинуть редактирование плашки») в верхнем правом углу окна.
- 9.3.14 Проверьте название файла плашки в диалоговом окне «Save As» («Сохранить как»), затем нажмите кнопку «Save» («Сохранить»).
- Примечание – Вы можете выйти из Редактора плашки, щелкнув по кнопке «Save & Exit Plate Editing» или по кнопке «Cancel & Exit Plate Editing» («Отменить и выйти из редактирования плашки»).
- Для последующих постановок можно редактировать сохраненный файл настройки плашки, а не создавать его заново.
- 9.3.15 После выбора необходимого протокола и файла настройки плашки запустите выполнение протокола. Для этого нажмите кнопку «Run» в правом верхнем углу окна «Setup». Программа перейдет в модуль «Run-Time Central» («Модуль отображения текущего процесса»).
- 9.3.16 Отметьте окошко «Use Persistent Well Factors» в левой верхней области окна.




- 9.3.17 Проверьте условия постановки амплификации. Протокол, который будет выполняться, находится в нижнем левом углу окна, а настройка плашки, которая будет использоваться - в нижнем правом углу окна.
- 9.3.18 При необходимости внесите дополнительную информацию об исследовании в окно «Notes» («Примечания»). Эти примечания будут вставлены в экспериментальный файл. Нажмите кнопку «Begin Run» для запуска прогона. Откроется диалоговое окно «Save».
- 9.3.19 Наберите имя для файла оптических данных. iQ5 автоматически сохраняет данные во время эксперимента.

10 РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ

10.1 Регистрация результатов амплификации с использованием детектора флуоресценции «Джин» или «Джин-4» (формат «FLASH»)

После прохождения реакции амплификации поместите пробирки в детектор флуоресценции, оформите протокол и проведите регистрацию результатов в соответствии с инструкцией к прибору (см. «Руководство по эксплуатации», п.4 «Порядок работы с прибором»).

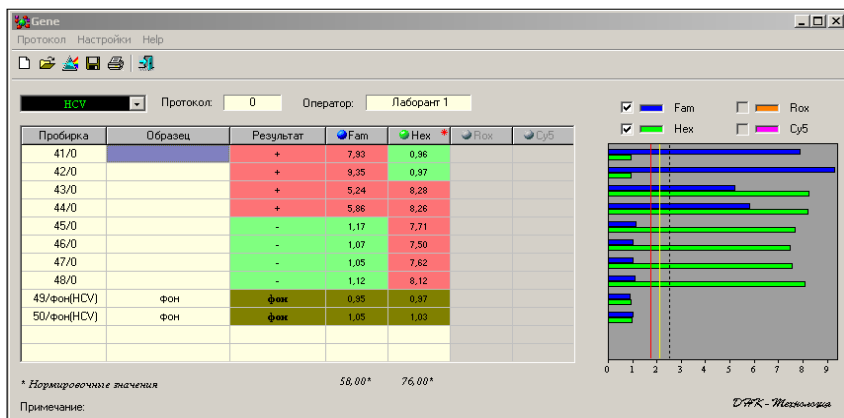

Примечание – Пороговые значения для специфического продукта составляют 1,75-2,10; для внутреннего контроля – 2,50.

10.2 Регистрация результатов амплификации (формат «Real-time»)

Регистрация сигнала проводится прибором во время амплификации.

Детекция и учёт результатов осуществляются детектирующим амплификатором автоматически.

Анализ проводится программным обеспечением.


10.2.1 Для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96:

После окончания программы амплификации на экране появится соответствующее информационное сообщение и будет предложено перейти к анализу результатов (п. 4.6 части 1 («Работа с прибором») Руководства по эксплуатации для амплификаторов детектирующих). Анализ проводится программным обеспечением.

На графике будет отображена зависимость флуоресценции от номера цикла для каждой пробирки в термоблоке. В таблице справа будет показан идентификатор образца и индикаторный цикл (Cp) для каналов Fam и Hex.

По результатам анализа можно сформировать и распечатать отчёт.

Для создания лабораторного отчёта необходимо нажать кнопку «Отчет» .

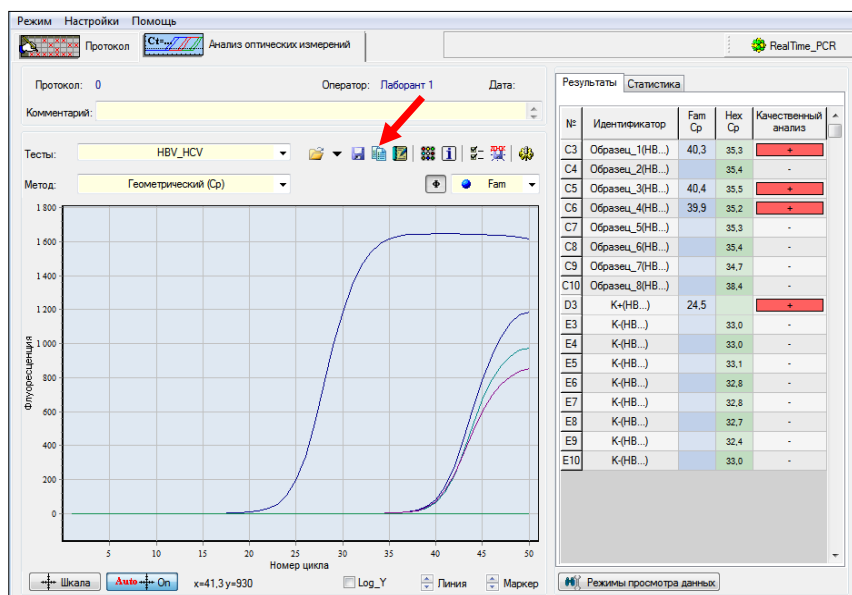


10.2.2 Для прибора iQ:

Анализ и представление результатов осуществляется в модуле «Data Analysis» («Анализ данных»).

Закладка «PCR Quantification» включает в себя два окна:

- график амплификации;
- таблицу с показателями Ct и идентификаторами образцов.

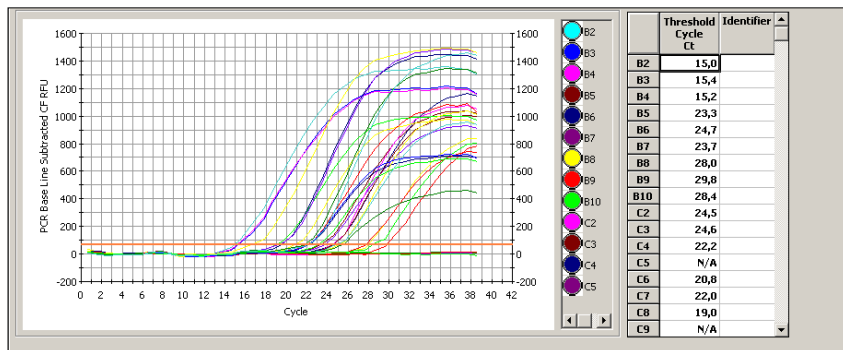

По результатам анализа можно сформировать и распечатать отчёт.

Для создания отчета необходимо:

1. Нажать кнопку «Reports». Откроется окно «Report Viewer» («Просмотр отчётов»).
2. Выбрать в поле «Select Report» («Выбор отчёта») пункт «Std Curve with Amp Cycle».
3. Выбрать в поле «Sort Data By» («Сортировка данных по...») пункт «Well» («Лунки»).
4. Выбрать метку «Ascending Order» («Сортировка по возрастанию»).


10.2.3 Для прибора iQ5:

Анализ и представление результатов осуществляется в модуле «Data Analysis» («Анализ данных»).

Нажмите кнопку «PCR Quant» («Количественный анализ ПЦР») для выбора закладки «PCR Quant».

Закладка PCR Quant включает в себя два окна:

- график амплификации;
- таблицу результатов.

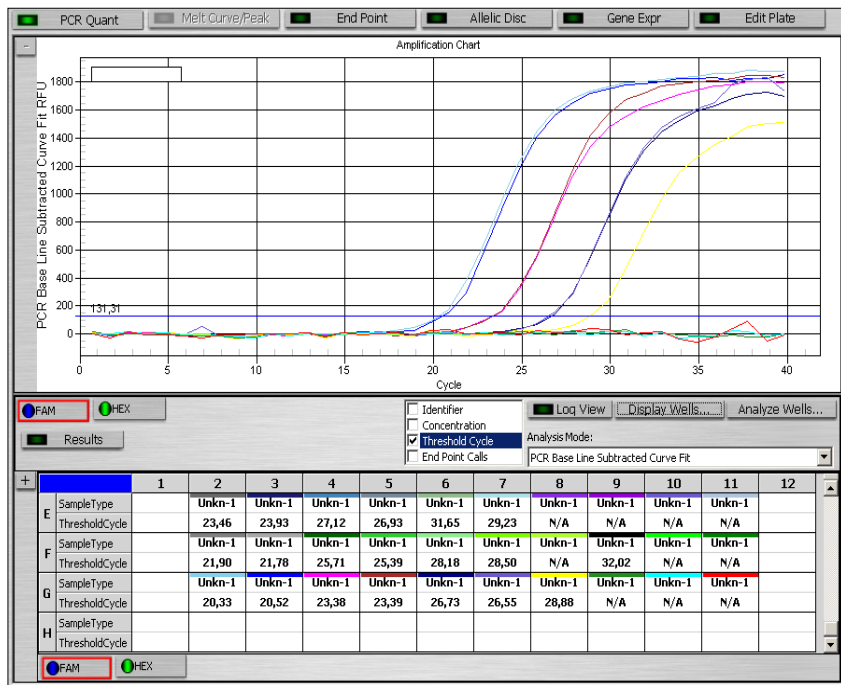


По результатам анализа можно сформировать и распечатать отчет. Для создания отчета необходимо:

1. Выбрать оба флуорофора FAM и HEX. Выбранные флуорофоры выделены красной рамкой.




2. Щелкнуть по пункту «Reports» в меню программы.

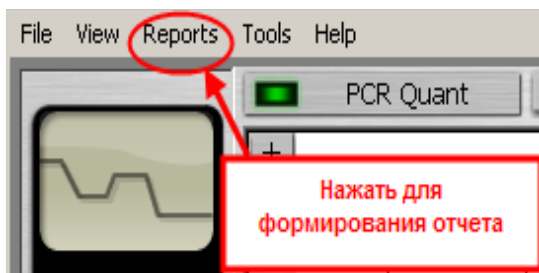

Откроется окно «Report Viewer» («Просмотр отчётов»).

3. Выбрать в поле «Select Report» («Выбор отчёта») пункт «PCR Quant Detailed» («Детализированный отчёт о количественной ПЦР»).
4. Выбрать в поле «Sort Data By» («Сортировка данных по...») пункт «Well» («Лунки»).
5. Выбрать метку «Ascending Order» («Сортировка по возрастанию»).

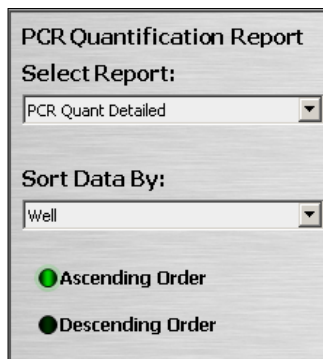

Результаты анализа представлены в разделе «**Standard Curve Spreadsheet Data**».

В таблице отображается следующая необходимая информация:

Fluor – флуорофор;

Well – номер лунки;

Type – тип образца:

- **Unkn** (Unknown)– неизвестные образцы,

Ident – идентификатор пробирки;

Rep – номер образца в плашке;

Ct – пороговый цикл в данной пробирке;


Ct Mean – средняя величина порогового цикла в дублях.

При выполнении 10.2.3 рекомендуется обратить внимание на высоту пороговой линии.

Графики кривых **положительных образцов** должны находиться **выше пороговой линии**, начиная с порогового цикла.

Графики кривых **отрицательных образцов** должны находиться **ниже пороговой линии**.

При необходимости скорректируйте пороговую линию.

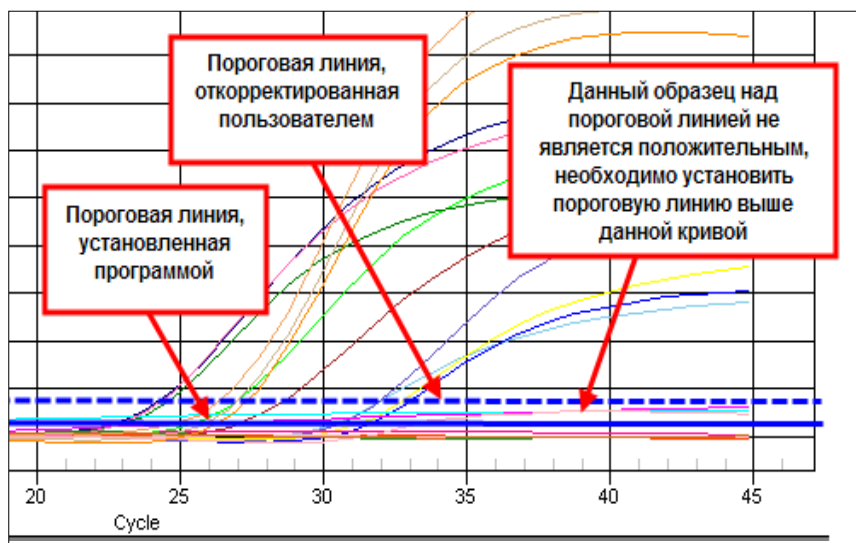

10.3 Регистрация результатов амплификации с использованием электрофореза

10.3.1 Откройте крышки пробирок с продуктами амплификации и проколите в парафине отверстие с помощью стальной проволоки диаметром 1,0 мм. После прокалывания каждой пробирки проволоку промойте в ёмкости с водопроводной водой.

10.3.2 Для приготовления буферного раствора для электрофореза содержимое пакета со смесью для электрофореза перенесите в мерную колбу объёмом один литр, добавьте приблизительно 700 мл дистиллированной воды, перемешайте до полного растворения и доведите дистиллированной водой до метки.

Примечание – Буферный раствор для электрофореза можно хранить при комнатной температуре не более одной недели или при температуре от 2 °C до 8 °C не более одного месяца.

- 10.3.3 Заполните камеру для электрофореза буферным раствором для электрофореза и поместите пластину с агарозным гелем в камеру для электрофореза.

Примечание – Буферный раствор для электрофореза должен покрывать пластину с гелем слоем приблизительно 3–5 мм. При работе с агарозным гелем следует обязательно надевать одноразовые медицинские перчатки!

- 10.3.4 Осторожно внесите 7,0 мкл продуктов амплификации из каждой амплификационной пробирки в соответствующую лунку агарозного геля под буфер.
- 10.3.5 Установите крышку камеры для электрофореза и подключите источник постоянного тока. Электрофорез проводится при напряжении 20 вольт/см в течение 10 мин (при ширине камеры 10 см напряжение, устанавливаемое в источнике постоянного тока, должно быть приблизительно равно 200 В).
- 10.3.6 После окончания электрофореза отключите источник постоянного тока, снимите крышку с камеры.
- 10.3.7 Выньте пластину с агарозным гелем из камеры для электрофореза, снимите гель с пластины, подцепив его с края, и поместите на экран трансиллюминатора.
- 10.3.8 Наденьте защитную маску или установите защитный экран, включите трансиллюминатор и проанализируйте полученные результаты.

11 УЧЁТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ

11.1 Учёт результатов реакции с помощью детектора флуоресценции или детектирующего амплификатора. Интерпретация результатов проводится в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Интерпретация результатов ПЦР

Формат «FLASH»	Формат «Real-time»		Интерпретация ⁷
Результат, выданный флуоресцентным детектором «ДЖИН» или «ДЖИН-4»	Результат по каналу детекции Fam (искомая РНК)	Результат по каналу детекции Hex (внутренний контроль) ⁸	
Анализируемые образцы			
«+»	Ср/Ct указан	Не учитывается	Обнаружена РНК HCV («+»)
«-»	Ср не указан (для iQ N/A)	Ср (для iQ5 Ct) 29-34	Не обнаружена РНК HCV («-»)
«НД»	Ср не указан (для iQ N/A)	Ср не указан (для iQ N/A)	Недостоверный результат («нд»)
Положительный контрольный образец			
«+»	Ср (для iQ5 Ct) <33	Не учитывается	Положительный результат («+»)
Отрицательный контрольный образец			
«-»	Ср не указан (для iQ N/A)	Ср (для iQ5 Ct) 29-34	Отрицательный результат («-»)

⁷ - в скобках представлен результат в графе «Качественный анализ» для приборов ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96.

⁸ – если значение Ср (Ct) по каналу Hex больше указанного, результат недостоверный!


11.2

Учёт результатов реакции с помощью гель-электрофореза

Интерпретация результатов проводится в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Специфический фрагмент (253 п.н.)	Внутренний контроль (480 п.н.)	Интерпретация
Анализируемые образцы		
+	Не учитывается	Обнаружена РНК HCV
-	+	Не обнаружена РНК HCV
-	-	Недостоверный результат
Положительный контрольный образец		
+	Не учитывается	Положительный результат
Отрицательный контрольный образец		
-	+	Отрицательный результат

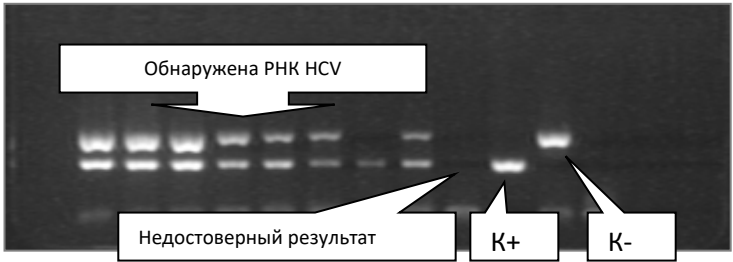

11.3

Недостоверный результат может быть связан с присутствием ингибиторов в препарате РНК, полученном из клинического материала; неверным выполнением протокола анализа; несоблюдением температурного режима амплификации и др. В этом случае требуется либо повторная постановка ПЦР, либо повторное выделение РНК и постановка обратной транскрипции и ПЦР для этого образца, либо повторное взятие клинического материала у пациента (выполняется последовательно).

11.4 При получении недостоверного результата для положительного контрольного образца результаты всей постановочной серии считают недостоверными. В этом случае требуется повторная постановка амплификации всей партии образцов.

11.5 При получении положительного результата на наличие РНК HCV в отрицательном контрольном образце, результаты всей постановочной серии считают недостоверными. В этом случае необходимо проведение специальных мероприятий для устранения возможной контаминации.

12 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

12.1 Транспортирование набора осуществляют всеми видами крытого транспорта при температурах, соответствующих условиям хранения комплектов реагентов, входящих в состав набора.

12.2 Комплекты реагентов для обратной транскрипции и ПЦР-амплификации, кроме пробирок со смесью для амплификации, запечатанной парафином, и положительного контрольного образца, следует хранить при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С в течение всего срока годности. Допускается хранение ПЦР-буфера и минерального масла при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности набора. Допускается многократное замораживание/оттаивание ПЦР-буфера и минерального масла.

12.3 Пробирки со смесью для амплификации, запечатанной парафином, положительный контрольный образец и комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот следует хранить в защищённом от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности набора.

12.4 Набор должен применяться согласно действующей версии утверждённой инструкции по применению.

12.5 Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.

12.6 Набор с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

13 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- 13.1** Наборы с истекшим сроком годности и неиспользованные реактивы утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
- 13.2** непригодные для использования наборы реагентов, упаковка набора реагентов (пробирки, флаконы, полиэтиленовые пакеты с замком и коробки из картона) относятся к отходам класса А и утилизируются с бытовыми отходами.

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 14.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями.
- 14.2** Срок годности набора – 9 месяцев при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

По вопросам, касающимся качества набора ОТ–ГЕПАТОГЕН-С, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО «ДНК-Технология», 117587, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш. Варшавское, д. 125Ж, к. 5, этаж 1, пом. 12, тел./факс +7 (495) 640-17-71

Служба клиентской поддержки:

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный),
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru

Адрес производителя:

ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Место производства:

Код изготовителя указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии набора):

1. ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

2. ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.


Приложение А (справочное)

Символы, используемые при маркировке набора

	Только для in vitro диагностики
	Температурный диапазон
	Количество определений
	Годен до
	Серия набора
	Дата производства
	Содержит инструкцию по применению
	Каталожный номер
	Адрес производителя
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

Приложение Б
(справочное)

Номограмма и формула перевода относительного
ускорения центрифуги (RCF) в скорость вращения (RPM)
в зависимости от диаметра ротора

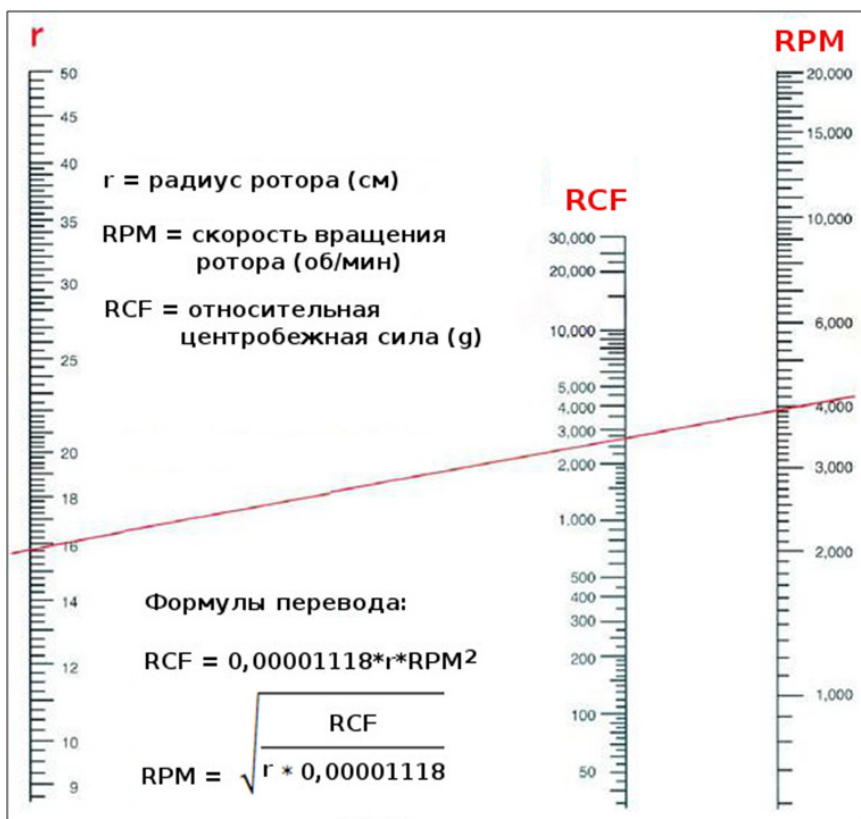

Номер 137-16
2021-07-30

ООО «ДНК-Технология»
117587, Россия, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное,
ш. Варшавское, д. 125Ж, к. 5, этаж 1, пом. 12
Тел./факс +7 (495) 640-17-71
Служба клиентской поддержки:
8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный)
+ 7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный)
E-mail: hotline@dna-technology.ru